

AmpliDect 595

Trådlös telefon med hörslina,
extra förstärkning, bildknappar

Bruksanvisning



WARNING! Mycket hög volymförstärkning i telefonluren vid maxinställningar. Risk för ljudchock!

Art nr 273120

Innehåll

Förpackningsinnehåll	3
Inledning	3
Säkerhetsinformation.....	3
Produktöversikt	4
Basenhet.....	4
Handenhet.....	5
Placering.....	7
Anslutning av basenheten.....	7
Installera och ladda batterier i handenheten.....	7
Första användningen av handenheten	8
Registrering av handenhet.....	8
Svara, ringa och föra över samtal.....	8
Svara	8
Ring ut	8
Föra över samtal.....	8
Avsluta samtal.....	8
Intercom.....	9
Internt samtal.....	9
Ring alla handenheter.....	9
Konferenssamtal	9
Telefonbok.....	9
Lägg till ny post.....	9
SOS Nödsamtal	9
Lägg till SOS-nummer.....	9
Gör ett SOS-nödsamtal.....	10
Spela in SOS-meddelanden	10
Spela upp SOS-meddelanden.....	10
Kortnummer (1-9).....	10
Spara kortnummer.....	10
Ringa kortnummer.....	10
Snabbval/bildknappar/direktminne (M1-M0)	11
Lägga till snabbvalsnummer	11
Redigera snabbvalsnummer.....	11
Telefonsvarare	11
Telefonsvarare på/av.....	11
Spela upp meddelanden.....	12
Ställ in svarsfördröjningen.....	12
Fjärråtkomst.....	12
Alarm/påminnelsefunktionen.....	13
Talande siffror	13
Översikt meny	14
Tekniska data	16
Garanti	16
Service	16
Miljö och återvinning	16

Förpackningsinnehåll

Paketet innehåller följande saker:

- Telefon (handenhet)
- Basenhet
- Nätadapter
- 3 st uppladdningsbara batterier (NiMH)
- Telefonsladd
- Bruksanvisning

Inledning

Tack för att Du har valt att köpa en AMPLIDECT595telefon. Vi hoppas att Du kommer att bli nöjd med produkten.

Varning! Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att alla användare känner till detta.


AMPLIDECT595 har inbyggd hörslinga som fungerar tillsammans med hörapparater. Slingan är alltid aktiv och telefonen hålls på vanligt sätt mot örat.






Säkerhetsinformation

Det är viktigt att du läser nedanstående information innan du börjar använda telefonen.

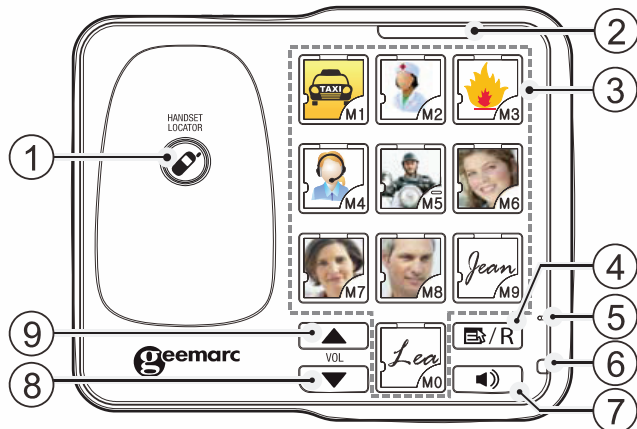
1. VARNING! Mycket hög volymförstärkning i telefonluren vid maxinställningar. Risk för ljudchock!
2. Placera basstationen på ett jämnt och torrt underlag så att den står säkert. Dra sladdarna så att det inte finns någon risk att du eller någon annan snubblar på dem.
3. Ta ur strömsladden ur eluttaget om du behöver rengöra telefonen. Använd endast en fuktig rengöringsduk, utan tillsats av rengöringsämnen.
4. Se till att inga föremål står på el- eller telesladd så att de kläms.
5. Utsätt aldrig telefonen för stark värme, direkt solljus, starka rengöringsmedel, ånga, fukt eller damm.
6. Anslut endast godkända tillbehör till telefonen.
7. Öppna aldrig bas- eller handenheten. Detta får endast utföras av fackman.
8. Var noggrann med att placera batterierna åt rätt håll enligt symbolen i batterifacket. Se detaljerad information i kapitlet om batterier och laddning.
9. Använd aldrig standardbatterier eller alkaline batterier. Använda batterier får ej slängas i hushållssoporna.
10. Plocka ut batterierna ur handenheten om telefonen står oanvänd under en längre tid (1 månad).
11. Använd endast bifogad strömkabel.
12. Se till att telefonen är utom räckvidd för småbarn.
13. Använd inte telefonen om den visar ytliga skador p.g.a. att den tappats i golvet eller dylikt.
14. Telefonen är avsedd för användning i temperaturer från 5° C till 45° C
15. För att minska risken att telefonen förstörs av blixtnedslag bör telefonen kopplas ur vid kraftigt åskväder.



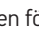


Basenhet



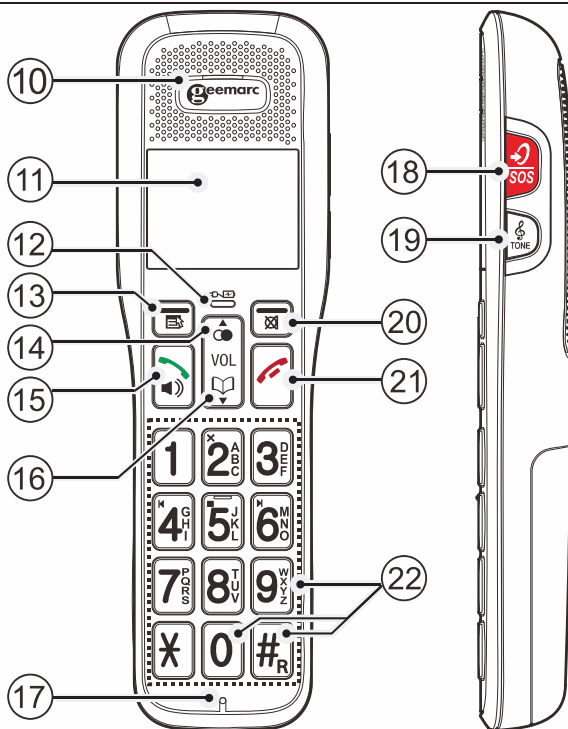






1. **HITTA HANDEHET**  När telefonen är i viloläge, trycker du på knappen för att söka handenheten.
2. **LAMPA** Lampan lyser när handenheten eller basen är i bruk, eller när du svarar på ett inkommande samtal. Lampan lyser när en handenhet registreras. Lampan blinkar vid inkommande samtal eller i sökningsläge.
3. **BILDKNAPPAR** 10 stora programmerbara bildknappar. De kan också användas som siffror för att ringa ett telefonnummer från basenheten.
4. **ÅTERUPPRINGNING/ PROGRAMMERING**  /R I bruk: Tryck på knappen för att göra en återuppringning av senaste nummer. I viloläge: Tryck på knappen för att programmera bildknapparna.
5. **MIKROFON**
6. **HÖGTALARINDIKATOR** Lampan lyser när högtalaren är på.
7. **HÖGTALARE**  Tryck på knappen för att använda högtalaren. OBS! Vänta 2 sekunder innan du ringer upp telefonnumret med bildknappar.
8. **VOL**  I viloläge trycker du på pilen nedåt för att sänka ringsignalsvolymen. I högtalarläge trycker du på pilen för att sänka högtalarvolymen.
9. **VOL**  I viloläge trycker du på pilen uppåt för att öka ringsignalsvolymen. I högtalarläge trycker du på för att öka högtalarvolymen.

Handenhet



10. HÖRTELEFON/HÖGTALARE
11. LCD-SKÄRM
12. LADDNINGSIKDIKATOR  Lampan lyser med fast sken när handenheten laddas i laddaren.
13. MENU/OK  I viloläge: Tryck för att komma till huvudmenyn.
I undermenyläge: Tryck för att bekräfta valet.
I samtalsläge: Tryck för att öppna Intercom/Telefonbok/Uppringningslista/Samtalslista.
14. UPP/SAMTALSLISTA  I viloläge: Tryck för att komma till återuppringningslista.
I menyläge: Tryck för att bläddra upp i menyalternativen.
I telefonbokslistan/återuppringningslistan/samtalslistan: Tryck för att rulla uppåt i listan.
I redigeringsläge: Tryck för att flytta markören ett tecken till vänster.
I samtalsläge: Tryck för att öka lyssningsvolymen.
I uppringningsläge: Tryck för att öka ringsignalvolymen.
15. HÖRTELEFON  (grön lur) HÖGTALARLÄGE 
I viloläge: Tryck för att ringa i hörtelefonläge.
I telefonbok/återuppringningslista/samtalslista: Tryck för att ringa till valt nummer i listan i hörtelefonläge.
I uppringningsläge: Tryck för att svara på ett samtal i hörtelefonläge.
I samtalsläge: Tryck igen för att byta till högtalarläget. Tryck igen för att byta till hörtelefonläge.

16. NED/TELEFONBOK 
I viloläge: Tryck för att komma till telefonboken.
I menyläge: Tryck på för att rulla ner menyalternativen.
I telefonbokslistan/återuppringningslistan/samtalslistan: Tryck för att rulla ner listan.
I redigeringsläge: Tryck för att flytta markören ett tecken till höger.
I samtalsläge: Tryck för att minska lyssningsvolymen.
I uppringningsläge: Tryck för att minska ringvolymen.
17. MIKROFON
18. VOLYMFÖRSTÄRKNING/ SOS 
I samtalsläge: Tryck för att aktivera/avaktivera volymförstärkningsfunktionen.
I viloläge: Håll intryckt i 3 sekunder för att starta SOS-funktionen/uppringning av de inprogrammerade SOS-numren i handenheten.
I samtalsläge: Håll intryckt i 2 sekunder för att stoppa nödsamtalet.
19. TON 
I samtalsläge: Tryck för att öka den höga frekvensen eller de låga frekvenserna.
20. AVBRYT/TYST LÄGE 
I huvudmenyn: Tryck för att gå tillbaka till viloläge.
I undermenyläge: Tryck för att gå tillbaka till föregående meny.
I redigeringsläge: Tryck för att radera ett tecken/siffra.
I redigeringsläge: Tryck och håll in för att radera alla tecken/siffror.
I samtalsläge: Tryck för att stänga av/sätt på mikrofonen.
I uppringningsläge: Tryck för att stänga av ringsignalen.
I viloläge: Tryck för att söka en annan enhet.
21. AVSLUTA/PÅ/AV  (röd lur)
I samtalsläge: Tryck för att avsluta ett samtal och gå tillbaka till viloläge.
I meny/redigeringsläge: Tryck för att gå tillbaka till viloläge.
I viloläge: Tryck och håll ned för att stänga av handenheten.
Tryck och håll ned för att slå på när den är avstängd.
22. SIFFER-/NUMMERKNAPPAR, STJÄRNA , FYRKANT R 
I vilo-/redigeringsläge: Tryck för att skriva en siffra/tecken.
I viloläge/nummerredigeringsläge: Tryck och håll ner **0** för att sätta in ett mellanslag.

Placering


För att maximera täckningen och minska störningar, är här några riktlinjer du bör tänka på när du placerar basenheten:

- Placera den på ett bekvämt, högt och centralt läge med fritt fält mellan handenheten och basenheten i en inomhusmiljö.
- Placera den så långt bort från elektroniska apparater som TV, mikrovågsugnar, radioapparater, datorer, trådlösa enheter eller andra trådlösa telefoner som möjligt.
- Undvik att ansluta den till samma eluttag som andra större hushållsapparater för att minska risken för störningar.
- Om mottagningen för en basenhet är dålig, flytta den till en annan plats för bättre mottagning.
- Räckvidden kan påverkas av omgivningen och är oftast större utomhus än inomhus.

Anslutning av basenheten

1. Anslut nätadaptern till ett eluttag.
2. Trä kablarna genom klämmorna.
3. Anslut adaptersladden på basenhetens undersida.
4. Anslut telefonsladden till en telefonuttag eller ett DSL-filter.
5. Ett DSL-filter (ingår ej) krävs om du har höghastighetsinternet. DSL-filtret måste inkopplat i telefonuttaget.
6. Anslut den andra änden av telefonsladden till TEL. LINE-ingången på undersidan basenheten.

OBS! Använd endast medföljande nätadapter.

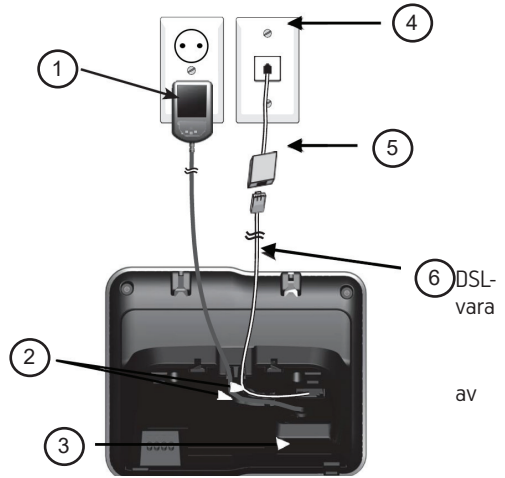

Installera och ladda batterier i handenheten



1. Skjut batteriluckan nedåt.
2. Sätt i de 3 batterierna i batterifacket, med motsvarande polaritet (+, -).
3. Skjut batterifacket uppåt tills det klickar på plats.
4. Ladda batterierna genom att placera handenheten i basenheten. Du hör ett pip när den börjar ladda.
5. Ladda batterierna i minst 12 timmar första gången.

OBS! Använd endast de medföljande NiMH-uppladdningsbara batterierna.

Ta ur batterierna om du inte använder telefonen under en längre tid, för att förhindra eventuell läckage.

Första användningen av handenheten

Efter att du har satt i batterierna får du välja språk med knapparna ▼ ▲.

Tryck på MENY/OK  för att spara.

Ange sedan datumet med knappsetsen och spara genom att trycka på MENY/OK.

Ange rätt timme med knappsetsen och spara genom att trycka på MENY/OK.

Ange rätt minut med knappsetsen och spara genom att trycka på MENY/OK.

Registrering av handenhet

OBS! Telefonen och basstationen är förregistrerade. Upp till fem handenheter kan registreras till en basstation.

På basenheten: Tryck och håll ner HITTA HANDEHET  tills du hör ett pip (registreringsläge).

Samtidigt på handenheten: Tryck på MENU/OK  Använd ▼ ▲ och välj HS-INSTÄLLNINGAR.

Bekräfta med MENU/OK. Använd ▼ ▲ för att välja REGISTRERA. Bekräfta med MENU/OK.

Om registreringen lyckas hörs det ett bekräftelsepip och handenhetsskärmen visar det nya handenhetsnumret. Basskärmen går tillbaka till viloläge.

Svara, ringa och föra över samtal


Svara



- på basenheten genom att trycka på .

- på handenheten genom att trycka på .

När det ringer går ringsignalen automatiskt över till handenheten om den är urtagen från basenheten.

Ring ut

- på basstation genom att trycka på  och sedan ett bildminne i minst 3 sekunder eller använd knapparna som sifferknappar.


- på handenheten genom att skriva in numret och trycka på . Eller välj nummer i telefonlista, i kortnummerlista eller återuppringningslistan och trycka på .

Föra över samtal

- Om du har svarat/ringt på basenheten men vill föra över samtalet till handenheten, trycker du först på handenhetens  sedan på basenhetens .

- Om du har svarat/ringt på handenheten men vill föra över samtalet till basenheten trycker du först på basenhetens  sedan på handenhetens .

Avsluta samtal

- på basenheten genom att trycka på .

- på handenheten genom att trycka på .

Intercom

Internt samtal

1. Tryck på MENU/OK och ▼ ▲ för att välja INTERCOM. Bekräfta med MENU/OK.
2. Välj önskad telefon; Bas eller Alla, och tryck på MENU/OK.

Om du får ett samtal på basen i högtalarläge blir samtalet automatiskt överfört till handenheten om handenheten är urtagen från laddaren.

Ring alla handenheter

Gör om från punkt 1 ovan och välj Alla.

Konferenssamtal

Gör om från punkt 1 ovan och välj önskad handenhetsnummer med ▼ ▲.

Efter anslutningen håller du ✕ intryckt tills Konferens visas.

OBS! Alla kan avsluta sitt eget samtal utan att konferenssamtalet bryts för resterande parter.

Telefonbok

Din telefon kan lagra upp till 50 nummer i handenheten. Varje telefonbokspost kan ha högst 20 siffror i telefonnumret och 10 tecken för namnet. Om ditt abonnemang erbjuder nummerpresentation, kan du vid inkommande samtal se uppringarens telefonnummer i skärmen.

Numren sparas i alfabetisk ordning efter namn.

Lägg till ny post

I viloläge: Tryck på MENU/OK och ▼ ▲ för att välja Telefonbok. Tryck på MENU/OK för att komma till telefonbokslistan (eller tom).

Tryck på MENU/OK 2 gånger för att välja Lägg till.

Tryck på MENU/OK för att välja Nummer. Skriv in nummer.

Tryck på MENU/OK för att välja Namn. Skriv in namnet.

Tryck på MENU/OK för att spara.

SOS Nödsamtal

Lägg till SOS-nummer

Du måste lägga till SOS-numren innan du kan ringa ett SOS-nödsamtal.

Använd handenheten:

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Ange SOS.

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja SOS-nummer.

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja att för att ange ett nytt nummer (SOS 1, SOS 2, SOS 3 eller SOS 4) eller Redigera för att ändra numret som redan lagrats.

Ring ett SOS-nödsamtal

Håll ner SOS-tangenten på handhøyheten i 3 sekunder för att komma in i nödsamtalssekvens från SOS 1-numret till SOS 4-numret.

En påringning kommer först att göras till SOS 1-numret. Om SOS 1 inte svarar på 60 sekunder, kopplas oppringningen över till SOS 2-numret, och så vidare.

OBS! Den andra parten som tar emot SOS-meddelandet måste svara på sin telefon för att ta emot SOS-samtalet och därefter trycka på valfri knapp varannan minut för att hålla nödsamtalet öppet, annars avslutas påringningen efter 10 sekunder.

Spela in SOS-meddelanden

Du kan spela in ditt eget SOS-meddelande som spelas upp när du ringer ut ett SOS-nödsamtal, annars används standardmeddelandet.

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Ange SOS.

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja SOS Meddelande.

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Spela in.

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att starta inspelning av SOS-meddelande och "Spela in" visas.

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att spara ditt SOS-meddelande.

Spela upp SOS-meddelanden

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Ange SOS.

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja SOS Meddelande.

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Spela.

Tryck på 5-tangenten för att stoppa oppspelingen av SOS-meddelandet.

Kortnummer (1-9)

Du kan spara upp till 9 kortnummer på handhøyheten. (Ej att förväxlas med snabbnummer/bildknappar)

Spara kortnummer

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Telefonbok och sedan Kortnummer.

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Lägg Till eller Redigera.

Tryck MENU/OK och skriv in telefonnumret.

Tryck MENU/OK och skriv in namn.

Tryck MENU/OK för att bekräfta.

Ringa kortnummer

I viloläge: Tryck och håll ner vald siffra i 3 sekunder (du hör ett bekräftelse pip) och oppringning påbörjas.

Snabbval/bildknappar/direktminne (M1-M0)

Du kan lagra 10 bildminnen på basenheten med motsvarande post i handenhetens Direktminneslista (ej att förväxla med kortnummer).

Lägga till snabbvalsnummer

På handenhet:

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Direktminne.

Tryck ▲ ▼ för att välja minnesposition (M1-M0).

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Lägg till eller Spela in namnet. (Om du får ett samtal från någon i snabbvalslistan kan du välja att få namnet uppspelat.)

Tryck MENU/OK för att bekräfta.

Posten sparas automatiskt på basenheten på motsvarande siffra/bild.

Redigera snabbvalsnummer

På handenhet:

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Direktminne.

Tryck ▲ ▼ för att välja minnesposition (M1-M0).

Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att redigera posten (visa/redigera/lägga rösttagg/radera). (Rösttagg: Om du får ett samtal från någon i snabbvalslistan kan du välja att få namnet uppspelat.)

På basenheten:

I viloläge: Tryck på Återuppringning/Programmering  och skriv in telefonnumret med M1 till M9. Tryck på  igen och tryck sedan på bildminnet som du vill koppla till numret.

OBS! Om du vill ringa ett snabbvalsnummer trycker du på bildminnet tills lampan på basenhetens överkant lyser.

Om du vill föra över samtalet från basen till handenheten lyfter du upp handenheten ur basen.

Avsluta genom att trycka på  på handenheten eller  på basenheten.

Telefon svarare

Telefon svarare registrerar obesvarade samtal när den är på. Telefon svararen kan lagra upp till 59 meddelanden inom den maximala inspelningstiden, ca 30 minuter.

Telefon svarare på/av

I handenheten:

1. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Telefon svarare (SVR.SYS)
2. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja TAM Av/På
3. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja bekräfta.

Spela upp meddelanden

Om du har nya meddelanden visar displayen t.ex. "2 nya meddelanden". De nya meddelandena spelas först upp, sedan sparas de som gamla meddelanden tills de tas bort. Gamla meddelanden spelas upp igen när alla nya meddelanden hörts.

Använd handenheten:

- Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Telefonsvarare (SVR.SYS)
 - Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Spela upp
 - Tryck MENU/OK igen för att starta uppspelning av meddelandet. På skärmen visas datum och timme för det mottagna meddelandet.
 - Under uppspelning, tryck på MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Stopp/Framåt/Föregående/Radera. Tryck MENU/OK för att bekräfta.
- STOPP: Stoppa det aktuella meddelandet.
 - FRAMÅT: Hoppa över för att spela nästa meddelande. Datum- och tidsinformation för nästa meddelande visas om det finns ett till meddelande.
 - FÖREGÅENDE: Backa för att repetera det aktuella meddelandet från början. Datum- och tidsinformation för det aktuella meddelandet visas.
 - RADERA: Radera det aktuella meddelandet och nästa meddelande kommer att spelas upp.

Ställ in svarsfördröjningen

Du kan ställa in antalet ringsignaler innan telefonsvararen svarar med ditt svarsmeddelande. Du kan ställa in två till tio ringsignaler eller Spara samtalskostnad.

Spara samtalskostnad-funktionen besvarar samtal efter 4 ringsignaler, tills det första nya meddelandet har registrerats. Sedan svarar telefonsvararen efter ca 2 signaler. Detta är användbart när du använder fjärråtkomst. Om du ringer upp telefonsvararen och inte får något telefonsvararmeddelande efter 3 signaler, betyder det att det inte finns några meddelanden inspelade och du kan lägga på innan du debiteras för samtalet.

På handenheten:

- Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Telefonsvarare (SVR.SYS)
- Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Ange TAM.
- Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja svarsfördröjning (SVR.FÖRD)
(Tillgängliga alternativ: 2, 4, 6, 8, 10 ringsignaler eller SPARA SAM).
- Tryck MENU/OK för att bekräfta.

Fjärråtkomst

Om du inte är hemma, kan du ringa din telefon med en annan tonvalstelefon för att slå på eller av telefonsvararfunktionen och lyssna på dina meddelanden.

- Ring ditt nummer från en tonvalstelefon.
- När telefonsvararen besvarar samtalet och börjar spela upp ditt svarsmeddelande, tryck på * (stjärna).
- Ange den fyrsiffriga fjärråtkomst-PIN-koden (standard-PIN är 0000).
- Tryck på följande tangenter för att utföra önskad funktion.

När meddelandet spelas upp:

Knapp (2): Radera aktuellt meddelande

Knapp (4): Repetera aktuellt meddelande från början. Tryck på (4) två gånger för att backa till förförre meddelandet.

Knapp (5): Stoppa uppspelningen

Knapp (6): Spela upp nästa meddelande

När meddelande inte spelas upp:

Knapp (7): Sätt på telefonsvararfunktionen

Knapp (9): Stäng av telefonsvararfunktionen

Knapp (*) Ange den 4-siffriga pin-koden

OBS! När ditt telefonsvararminne är fullt, går telefonen tillbaka till enbart ringsingaler, utan att telefonsvararen sätter igång. När några meddelanden har raderats, ändras det automatiskt tillbaka till telefonsvararläge "på".

Du kan inte ta bort nya meddelanden förrän du har lyssnat på dem, alternativt raderat dem under uppspelning.

Alarm/påminnelsefunktionen

Du kan spara upp till 10 alarm/påminnelse.

1. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja Påminnelse.
2. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja ditt larm 1-10.
3. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja på/av.
4. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ och skriv in tiden.
5. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ och välj frekvensen (en gång/dagligen/ mån-fre/lör-sön)
6. Tryck MENU/OK för att spara.

Du kan ändra melodi, namn, eller spela in röstmemo som spelas upp vid larmtiden.

Under Röstmemo kan du spela in ett meddelande. Tryck MENU/OK för att spara.

Talande siffror

Du kan välja att aktivera eller inaktivera funktionen Talande siffror (TLK).


1. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja TLK-siffror.
2. Tryck MENU/OK och ▲ ▼ för att välja på/av.
3. Tryck MENU/OK för att spara.

Översikt meny

Tryck på MENY/OK  för att öppna huvudmenyn. Använd sedan ▼ ▲ knappar för att välja läge.

Bekräfta genom att trycka på MENY/OK igen.

Backa genom att trycka på AVBRYT/TYST LÄGE .

För att gå ur menyn, tryck på  (röd lur).

Meny

Samtalslista ► Direktminne ► Telefonbok ► Samtalsblockering ► Intercom ►
Basinställning ► HS-Inställning ► Ange SOS ► Påminnelse- ► TLK-Siffror ► Svarssystem

Samtalslista

► Samtalslista ► Uppgifter ► Lägg till i telefonbok (PB) ► Bifoga i blockeringslista (BL) ► Lägg till i snabbval (BM: M1-M0) ► Radera ► Radera Alla

Direktminne (snabbval/bildknappar)

► Direktminne M1-0 ► Lägg Till ► Rösttagg

Telefonbok

► Alla ► Kortnummer ► Vip

- Alla: Telefonbokslista

- Kortnummer: (Tangent 1-9) Lägg Till ► Visa ► Redigera ► Radera ► Radera Alla

- Vip: Visa ► Radera ► Radera Alla ► Lägg till i snabbval (BM) ► Status Samtalsblockering

Samtalsblockering

► Svartlista ► Inställning

- Svartlista ► Lägg Till ► Visa ► Redigera ► Radera ► Radera Alla ► Lägg till i BM ► Status

- Inställning ► Blockeringsläge ► W/O Nummer ► Lägg till

Intercom

Intercom: ► Bas (ringer basstationen)

Basenhetsinställningar (BS)

► BS Ringer ► Ringvolym ► Ringläge ► Ringning 1

- BS Ringer: 1-5 Ringsignalsval (1 Förvalt)

- Ringvolym : 1-5 Volymlägen (3 Förvalt)

- Ringläge: Ton ► Puls

- Ringning 1: På ► Av

Handenhetsinställning (HS)

- ▶ Samtalsinställning ▶ Signalinställning ▶ Textspråk ▶ Datum & Tid ▶ Register ▶ Standard
- Samtalsinställning: Extern ringsignal ▶ Intern ringsignal ▶ Ringvolym
- Signalinställning: Tangentsignal ▶ Batterisignal ▶ Registeringssignal
- Textspråk: Svenska ▶ Dansk ▶ English ▶ Francais ▶ Deutch ▶ Italiano ▶ Norsk
- Datum & Tid
- Registrera handenheten
- Standard (återgår till standardinställning)

Ange SOS

- ▶ SOS-Nummer ▶ SOS-Meddelande ▶ SOS-Språk
- SOS-Nummer (1-3) ▶ Lägg till/Visa ▶ Redigera ▶ Radera ▶ Radera alla
- SOS-Meddelande ▶ Spela ▶ Radera ▶ Spela in
- SOS-Språk: Svenska ▶ English ▶ Francais ▶ Deutch ▶ Nederland

Påminnelse

- ▶ Larm 1-10 ▶ På/Av ▶ Melodi (1-10) ▶ Namnändra ▶ Röstmemo
- På: (En Gång/Dagligen/Mån-Fre/Lör-Sön)

Talande siffror (TLK)

- Talsiffror: På/Av

Telefonsvarare (TAM)

- ▶ Uppspelning ▶ Radera Gamla ▶ Memo ▶ TAM På/Av ▶ Ange TAM
- Ange TAM: TAM Språk ▶ Samtalskärm ▶ Meddelande ▶ Svar Fördröjning ▶ Inspelningstid
- ▶ Fjärråtkomst ▶ Ändra Pin ▶ Meddelandesignal

Tekniska data

Räckvidd	inomhus: 50m / utomhus: 300m	
Telefonlur	standbytid 100 timmar / Samtalstid ca 10 timmar	
Ljudförstärkning	+50dB	
Frekvens	1,88GHz till 1,9GHz	
Kanaler	10	
Strömförsörjning	Basenhet	Ingång: 100-240V 50/ 0Hz Utgång adapter 6V; 600mA
	Laddare	Ingång 100-240V 50/60Hz Utgång adapter 6V; 450mA
	Handenhet	3 batterier AAA 1.2V/600mAh, uppladdningsbara

Garanti

Produkten omfattas av 1 års garanti. Observera att produktgarantin inte omfattar fel som uppstått genom ingrepp i produkten, ovarsamhet, felaktig inkoppling/montering eller underhåll. Använd inte produkten med andra batterier eller nätadapterar än de som levereras med produkten.

Service

Om produkten inte fungerar, ska du kontakta försäljningsstället.

För produkt som är köpt direkt av Bo Edin AB, vänligen kontakta support@edin.se.

Miljö och återvinning



Släng förbrukade batterier/produkt enligt gällande miljöföreskrifter.

Bo Edin AB är anslutna till FTI (fd REPA) och El-kretsen.

Om du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar du till en bättre miljö.



Bo Edin AB
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818
Fax: 08 7671820

Email: info@edin.se
Webb: www.edin.se