

Pocketalker® 2.0

Personlig förstärkare modell PKT 2.0

ANVÄNDARMANUAL



Läs och bekanta dig med alla instruktioner och varningar innan du använder denna produkt. Spara manualen för framtida bruk.

Innehåll

Säkerhetsvarningar	3
Översikt	5
Artiklar som ingår	6
Översiktsdiagram	7
Komma igång	8
Uppladdning av NiMH-batterier	12
Förlänga den externa mikrofonen	15
Användning av halsslinga.....	16
Användning av halsrem.....	17
LED-lampor	19
Tips och råd / Felsökning	20
Rengöringsinstruktioner	21
Specifikationer.....	22
Begränsad garanti.....	25

Säkerhetsvarningar

VARNING!

Pocketalker 2.0 kan producera mycket höga ljudnivåer. Använd endast Williams Sounds hörlurar/öronproppar för att förhindra ljudnivåer på mer än 132 dB som kan skada din hörsel vid långvarig exponering. Williams Sounds hörlurar modell HED 026 bör inte användas med Pocketalker, eftersom de kan producera högre ljudnivåer än 132 dB.

VARNING!

Denna produkt är ett hjälpmedel som är utformat för att förstärka ljud till en hög nivå, vilket kan orsaka hörselskador om den används felaktigt. **För att skydda din egen och andras hörsel ska produkten användas enligt anvisningarna. Missbruk eller feljustering kan leda till personskada.**

1. Kontrollera att volymen är avstängd innan du sätter på dig hörlurarna. Justera volymen till en bekväm nivå när du använder öronproppar eller hörlurar.
2. Ställ in volymnivån till den lägsta inställning du behöver för att kunna höra.
3. Om du får en återkoppling (ett ylande eller skrikande ljud), sänk volymen och flytta mikrofonen bort från hörlurarna/öronpropparna.

VARNING!

1. Tala med din läkare eller tillverkaren innan du använder den här produkten med en pacemaker eller annan medicinsk utrustning.
2. Om du har en pacemaker eller annan medicinsk utrustning, se till att du använder den här produkten i enlighet med säkerhetsriktlinjer som fastställts av din läkare eller tillverkaren.

VARNING!

Låt inte barn eller andra obehöriga komma åt den här produkten.

VARNING!

1. För att förhindra skador, använd inte produkten nära vatten. Utsätt inte produkten för fukt, ånga, dusch, regn eller andra typer av vätskor.
2. Rengör din Pocketalker 2.0 och dess delar enligt rekommendation i avsnittet "Rengöringsinstruktioner" i denna handbok (eller se teknisk bulletin TCH 020 "Pocketalker Cleaning Instructions" genom att besöka vår webbplats).
3. För att undvika skador ska du inte använda eller förvara den här produkten i närheten av värmekällor som element, värmeventiler, ugn eller andra värmeproducerande produkter.
4. Använd endast tillbehör som anges av Williams Sound för att undvika skador.
5. För att förhindra kvävningrisk, använd inte produkten med hals slinga eller halsrem där det finns risk att fastna i maskiner eller andra föremål.
6. För att förhindra skador, använd inte produkten med delar som är skadade eller saknas, eller som är slitna eller har trasiga sladdar.
7. För att undvika skador, försök aldrig torka produkten med en hårtork, ugn eller mikrovågsugn.
8. För att förhindra skador ska du inte använda produkten medan du sover.
9. För att förhindra skador, ta inte isär produkten.
10. För att förhindra personskador ska Pocketalker 2.0, dess delar och batterier förvaras utom räckhåll för spädbarn, barn, husdjur och alla som kan svälja dem eller på annat sätt skada sig själva.
11. För att förhindra batteriläckage, ta ut batterierna om produkten inte ska användas på två månader eller längre.
12. För att förhindra skador, ladda inte produkten med uppladdningsbara batterier.
13. Var medveten om möjligheten att din Pocketalker 2.0 kan sluta fungera utan förvarning. Tänk på detta när du rör dig i trafik eller förlitar dig på varningsljud på något annat sätt.
14. Användning av hörlurar/öronproppar när du kör bil (eller annat fordon) kan begränsa eller förhindra uppfattningen av omgivande ljud och därmed orsaka en olycka.
15. För att förhindra skador, använd inte nära rent syre eller vid användning av rent syre.

VARNING!

FÖRSÖK TILL ATT UTFÖRA EGEN REPARATION ELLER SERVICE PÅ DENNA ENHET GÖR GARANTIN OGILTIG.

Reparation skall utföras av kvalificerad personal. Service krävs om enheten har skadats på något sätt, om vätska har trängt in i enheten, om enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt, har tappats till marken eller har gått sönder på något sätt.

Översikt

Pocketalker®2.0 är ett mångsidigt hörselhjälpmedel med hög kvalitet för att förbättra kommunikationen i svåra lyssningssituationer. Pocketalker levererar tydligt, klart ljud samtidigt som de stora, hanterbara knapparna ger en enkel användning.

Använd Pocketalker för att förbättra din hörsel när du pratar med en person, i små grupper, medan du lyssnar på TV/ radio eller kör bil.

Pocketalker är inte avsedd att användas som en hörapparat. Williams Sound rekommenderar att alla personer som upplever hörselnedsättning undersöks av en läkare / audionom för att hitta orsaken innan du använder en ljudförstärkare som Pocketalker.

Pocketalker erbjuds med uppladdningsbara alternativ.

Kontakta Williams Sound för mer information på telefonnummer 1-800-328-6190


Artiklar som ingår

PKT 2.0

- (1) PKT 2.0 personlig ljudförstärkare
- (1) BAT 010-2 Två AAA alkaliska batterier
- (1) MIC 014-R plug-in mikrofon, rundupptagande
- (1) EAR 042 öronproppar med dubbel stereoisolering
- (1) HED 024 stereohörlurar
- (1) RCS 003 halsrem

Alla tillbehör kan köpas separat


Översiktsdiagram

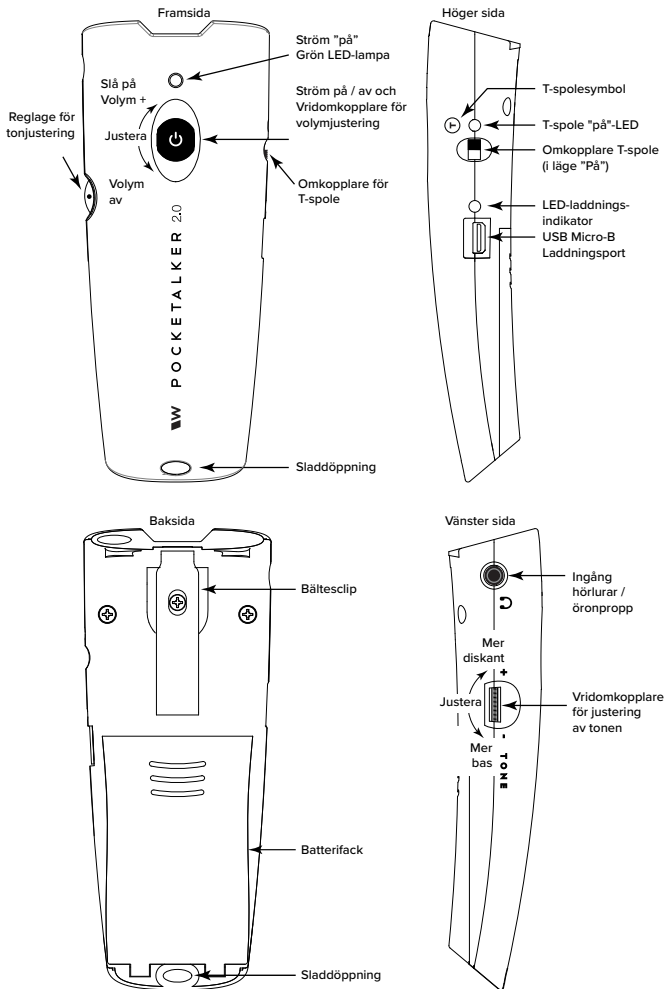

Komma igång

1. Öppna batteriluckan: Tryck hårt med tummen på lockets kant och skjut den nedåt och bort från Pocketalker 2.0.
2. Ställ omkopplaren för batteriet i det läget för vilken batterityp som ska användas (NiMH eller alkalisk).

Installering av batteri

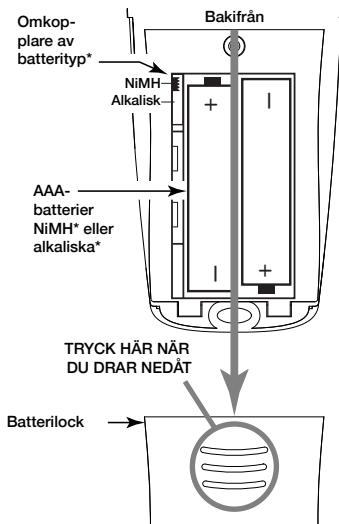

***OBS:** Om du använder uppladdningsbara NiMH AAA-batterier **MÅSTE** omkopplaren för batterityp ställas i NiMH-läge för att möjliggöra laddning!


3. Placera 2 st AAA-batterier i batterifacket, var noga med att placera polerna (+) och (-) korrekt.
4. Pocketalker levereras med de bästa hörlurarna. Williams Sound erbjuder flera alternativ, besök www.williamssound.com.

WARNING!

Ladda endast batterier som rekommenderas av Williams Sound. För att undvika personskador, ladda inte med alkaliska eller andra uppladdningsbara batterier!

Hörlursingång / öronpropp

Från vänster sida:

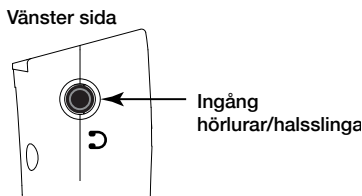


5. Använd hörlurar/öronproppar för en bekväm användning.

Obs: Om du använder mono hörlurar, vrid balansen helt åt vänster (moturs). Detta maximerar volymen och batteriets livslängd.

Balansjustering - Enkla/dubbla hörlurar


Batterifack:

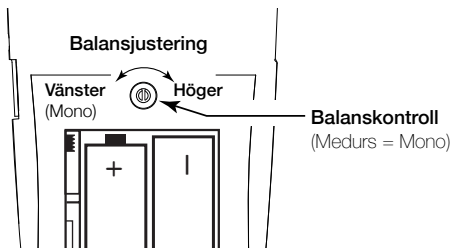

- Justera balansen för den typ av hörlurar som används. Vrid åt vänster (eller höger) med en liten skruvmejsel för att öka (eller minska) volymen på hörlurarnas vänstra eller högra sida.
- Stäng locket till batterifacket: Rikta locket innåt på enhetens baksida och skjut det uppåt tills den klickar på plats.
- Tillval: Om den externa mikrofonen (MIC 014-R) används, anslut den till det externa mikrofonuttaget på enhetens ovansida.

Användning / installation av mikrofon


Ovanifrån:

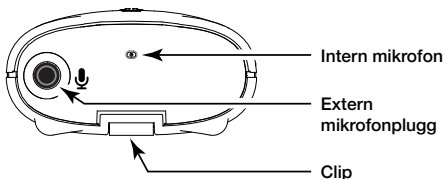

9. Slå på Pocketalker genom att vrida strömbrytaren/volymkontrollen "Power On / Off" uppåt. Den gröna "power on" -lampan på enhetens framsida ska tändas. När volymkontrollen vrids uppåt blir volymen högre.

Strömbrytare för på/volymjustering

Frontvy:

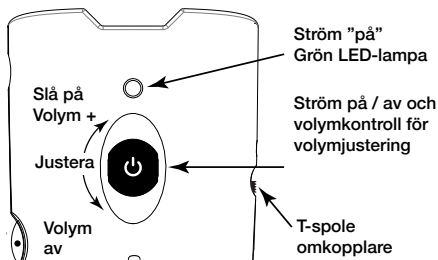


10. Justera volymen uppåt eller nedåt efter dina önskemål genom att vrida volymkontrollen uppåt (för mer volym) eller nedåt (för lägre volym).

Obs: Den gröna strömlampan "På" blinkar snabbt när batterinivån är låg.


11. Justera tonen efter dina önskemål. När du vrider tonkontrollen uppåt (+) förstärks diskanten (höga frekvenser). Om du sänker tonkontrollen (-) stärks basen (låga frekvenser). Den vita punkten på omkopplaren visar normal position (ingen bas eller diskantförstärkning).

Tonjustering

Från vänster sida:

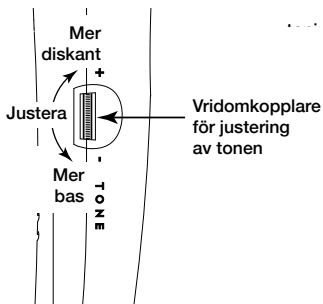

Framifrån:

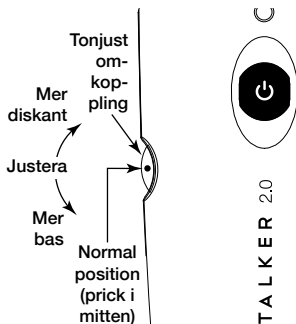

Använda den inbyggda T-spolen med teleslinga


Pockettalker kan användas med teleslinga. När T-spoleomkopplaren på Pockettalker är aktiverad avaktiverar Pockettalker mikrofoningången, tar upp slingans signal och skickar ljudet genom hörlursuttaget.

För att använda den här funktionen:

Följ instruktionerna "Komma igång" och istället för steg 8, Vrid T-spoleomkopplaren till "T-spole" -läget (upp mot T-spolens symbol). T-spolens "På" LED-indikator ovanför omkopplaren tänds.

T-spole omkopplare och LED-lampa

från höger sida:

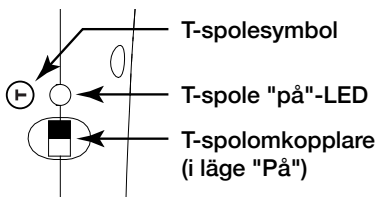

Obs: För bästa prestanda när du använder T-spolefunktionen

måste Pocketalker vara i **vertikal** riktning. Detta säkerställer den bästa magnetiska anslutningen till slingan. När T-spoleomkopplaren på Pocketalker är aktiverad, avaktiverar Pocketalker mikrofoningången.

Uppladdning av NiMH-batterier

BATTERILADDARE MODELL BAT KT8:

SÄKERHETSVARNINGAR

1. För att undvika personskador, ladda aldrig batterierna när Pocketalker 2.0 finns i trånga utrymmen som handväskor, fodral eller andra slutna förvaringsväskor.
2. För att förhindra personskador, koppla ur laddaren under åskväder, eller när laddningen är klar och enheten är oanvänd i två månader eller mer.
3. För att undvika personskador måste du vara medveten om att olika växelspanningar kräver användning av olika typer av vägguttag. Kontrollera nätspänningen i ditt område och använd rätt typ av kontakt.
4. Använd endast strömförsörjningen från Williams Sound för att undvika personskador. Andra strömförsörjningar kan ha liknande specifikationer, men kanske inte samma. Användning av icke godkänd strömförsörjning kan utgöra en säkerhetsrisk eller göra enheten delvis eller helt oanvändbar och kan upphäva garantin.
5. Använd inte strömförsörjningen eller ledningarna om de har skadats på något sätt.
6. Ladda inte batterierna i mer än 24 timmar. Koppla ur laddningsaggregatet från vägguttaget efter 24 timmar.

FÖR KUNDER I USA


Denna utrustning har testats och överensstämmer med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna.

	VARNING RISK FÖR ELEKTRISKT STÖT - ÖPPNA INTE	
<p>VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKT STÖT, TA INTE AV SKALET (ELLER SIDORNA). INGA INRE DELAR KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN, SERVICE MÅSTE UTFÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL.</p>		

FÖR KUNDER I KANADA

Denna digitala enhet av klass B uppfyller alla krav för Kanadas regler för störningsskapande utrustning.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

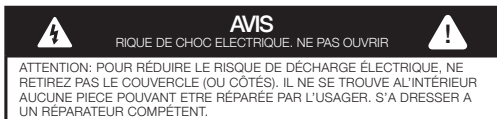

Instruktioner för laddning

Pocketalker kan ladda NiMH-batterier när de används tillsammans med ett BAT KT8 (internationell) laddningsset.


1. Kontrollera eller växla batterityp (omkopplaren är placerad i batterifacket) till NiMH-läge.
2. Verifiera eller sätt i NiMH-batterierna i batterifacket. Följ polaritetsmärkningen (\pm) på batteriet och utrustningen när du sätter i batterierna.
3. Använd USB A till USB Micro-B-kabeln, anslut USB Micro-B-änden till USB Micro-B-laddningsporten på Pocketalker. Anslut USB A-änden till USB A-porten på strömförsörjningen som medföljer laddningskittet. Anslut strömförsörjningen till ett vägguttag.
4. Laddningsindikatorn blinkar långsamt under laddningen och lyser sedan kontinuerligt när enheten laddas.

VARNING!

För att förhindra personskador, försök aldrig att ladda med icke-laddningsbara alkaliska batterier! Ladda endast med NiMH-batterier som rekommenderas av Williams Sound (BAT 022-2).

Laddningskopplingar

BAT KT8 laddningsset (internationell)

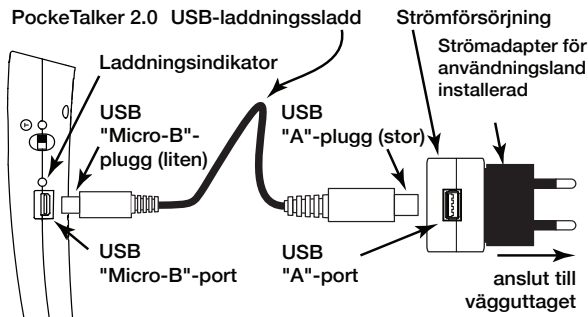

Lyssning under konversation med andra

Pocketalker plockar upp ljud och förstärker dem enligt den volym du har ställt in. För bästa resultat, placera eller håll Pocketalker-mikrofonen så nära den person som talar som möjligt.

Sittande

Många användare lägger Pocketalker på ett bord om de sitter på en restaurang eller i en liten grupp. Rikta mikrofonen i riktning mot personen som talar.

Står eller går

Många användare använder Pocketalkers bältesclip och fäster den på fickan, byxan eller kjolen. Nyckelbandet kan också användas (se avsnitt "Använda nyckelbandet").

I bilen

För samtal i bilen kan du använda en extern mikrofon (MIC 014-R) med valfri 3,5 mm - 3,5 mm mikrofonförlängningsssladd (WCA 007 WC) med extra klämma (CLP 014) för att fästa mikrofonen på passagerarens skjorta eller blus (se "Förlänga mikrofonen" på sidan 16).

VARNING!

För att förhindra skador, dra WCA 007 WC-sladden så att den inte orsakar trassel och / eller stör en säker körning.

Förlänga den externa mikrofonen

När Pocketalkers interna mikrofon är för långt ifrån önskad ljudkälla för att vara effektiv, kan 3,5 mm och 3,66 m långa förlängningssladden (tillval, WCA 007 WC) användas för att förlänga en extern mikrofon till en TV eller annan person.

VARNING!


För att förhindra personskada, placera WCA 007-sladden så att det inte finns någon risk att snubbla eller fastna.

Så här förlänger du mikrofonen:

1. Anslut den externa mikrofonen till honkontakten på förlängningssladden. Placera sladden så att den når högtalaren på TV:n eller en person. Anslut förlängningssladdens hankontakt till mikrofoningången på Pocketalker.


Användning av 3,5 mm 6,66 m förlängningssladd

Pocketalker: Framifrån

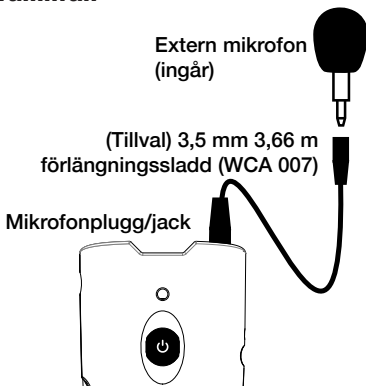

2. För TV: Fäst en av plastklämmorna (två PLC 004-klipp medföljer WCA 007 WC-settet) på TV:n, nära högtalaren, som bilden visar.
3. För TV: Skjut in mikrofonen i plastklämman.
4. För TV: Slå på TV:n och Pocketalker. Justera volymen på båda efter behov.
5. För att använda som myggmikrofon, sätt in MIC 014-R i CLP 014-klämman (tillval) och fäst den på kragen. Börja prata och justera volymen efter behov.

Placering av mikrofonklämma på TV

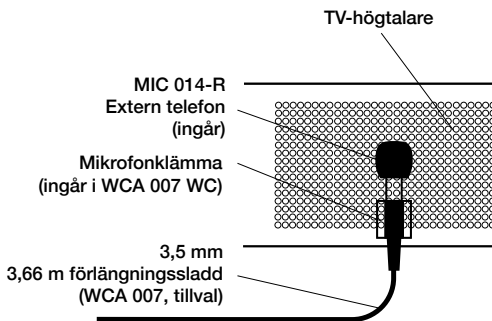

Användning av halsslinga


Williams Sound-halsslinga (NKL 001, tillval) kan användas med Pocketalker i situationer där användaren har en hörapparat med en T-spole.

! VARNING! För att förhindra kvävning, använd inte halsslingan om det finns risk för att den fastnar eller lindas in i andra föremål.

Så här fungerar det: Pocketalker plockar upp ljudet med den interna eller externa mikrofonen och skickar det till halsslingan. Halsslingan är magnetiskt ansluten till T-spolen i hörapparaten. När T-läget på hörapparaten är på kan personen höra ljudet direkt i hörapparaten.

För att använda halsslingan: Häng halsslingan runt halsen enligt bilden nedan. Håll höljet i ena handen, dra upp sladdkulan med den andra för att dra åt på ett bekvämt sätt. Anslut halsslingan till hörlursuttaget på Pocketalker. Aktivera T-läget på hörapparaten. Slå på Pocketalker och justera volymen till en bekväm lyssningsnivå.

Användning av halsslinga

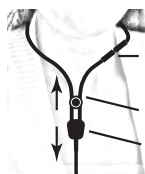

NKL 001 halsslinga har en säkerhetsfunktion och är konstruerad att öppna sig om den skulle fastna i något eller utsätts för höga belastningar.

Sladdlåsspanne - Dra uppåt för att dra åt

Halsslinga hölje - Håll ner medan du drar åt

Användning av halsrem


Medföljande halsrem (RCS 003) gör att du bekvämt kan bära din Pocketalker från en plats till en annan. Den skyddar din Pocketalker från att oavsiktligt tappas i golvet och erbjuder en snabb och enkel åtkomst för användning vid behov.



VARNING!

För att undvika kvävning bör halsremmen inte användas om det finns risk för att den fastnar i maskin eller andra föremål.

Pocketalker används runt halsen med medföljande halsrem

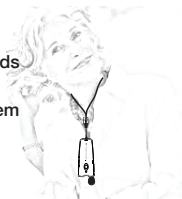

Obs:

Halsrem RCS 003 har en säkerhetsfunktion och är konstruerad att öppna sig om den skulle fastna i något eller utsätts för höga belastningar.

Använda Pocketalker vid ett bord med halsremmen som vristband




Installera halsrem (RCS 003)

Punkt 3



Punkt 1

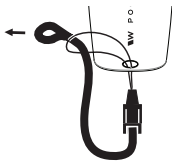


Punkt 2



LED-lampor

Ström-LED	Laddnings-LED	T-spole-LED	Angivet tillstånd
På	Av		Fungerar normalt; tillräcklig batterinivå
Blinkar snabbt	Av		Batterinivån är låg
	Blinkar långsamt		Batteriet laddas
	På (laddare inkopplad)		Batteriet är fulladdat
	Av (laddare inkopplad)		Inga batterier upptäcktes eller ingen laddare upptäcktes
		På	T-spole används; intern och extern mikrofongång inaktiverad
		Av	T-spole används inte; intern mikrofon aktiverad (eller extern mikrofon om den är inkopplad)
Av	Av		Batterinivån är för låg för att fungera
	Blinkar snabbt		Batterinivån är för låg för att kunna laddas. Pocketalken försöker uppdatera sina batterier. Om den fortsätter att blinka snabbt mer än två timmar är batterierna dåliga. Byt ut dem till nya batterier. Om uppdateringen lyckas blinkar LED-laddningslampan långsamt. Detta indikerar att normal laddning nu pågår.

LED-blinkhastigheter

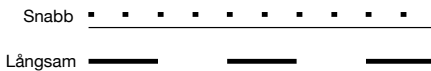



Snabb: 4 blinkningar varannan sekund

Långsam: 1 blinkning varannan sekund

Tips och råd / Felsökning

Pocketalker är utformad för att vara så enkel att använda som möjligt. Om du har problem kan du dock kontrollera följande:

1. Om du använder en extern mikrofon, se till att den är ansluten till utgången "Extern mikrofon"  och omkopplaren för T-läge är inställd på "Av". Se till att hörlurarna/öronpropparna är anslutna till ingången "hörlurar" . Om du använder T-spolen på Pocketalker, se till att omkopplaren för T-läge är på och verifiera att T-Spole lampan lyser.
2. Kontrollera att batterierna inte är urladdade och att de är korrekt isatta (observera polaritetsmärkningen \pm) i batterifacket.
3. Om du använder uppladdningsbara batterier, kontrollera att batterierna är tillräckligt laddade och att batterityp är inställd i NiMH-läge.
4. Om du hör ett ylande eller skrikande ljud kallas detta för ljudåterkoppling. Beroende på vilken hörlur som används kan du få återkoppling när volymen är inställd högre än 3 eller 3 1/2.

För att minska återkoppling, sänk volymen eller flytta mikrofonen (intern eller extern) längre bort från hörlurarna. Försök också vrida tonkontrollen nedåt (moturs) för att minska den höga frekvensen.

5. Pocketalkers hörlursuttag är en stereokontakt som är utformad för användning med stereohörlurar. Men om du använder mono-hörlurar med din Pocketalker, ställ balanskontrollen (i batterifacket) längst till vänster eller i "mono" -läge. Detta maximerar volymen och batteriets livslängd.
6. Hur LED-lamporna på enheten fungerar:
 - Ström PÅ LED** (på framsidan)
 - Laddnings-LED** (på höger sida)
 - T-Spole LED** (på höger sida)Se under "LED-indikatorer" för att hitta enhetens status och lösningen på problemet.
7. Om stegen ovan inte löser problemet, kontakta din Williams Sound återförsäljare för ytterligare instruktioner.

Rengöringsinstruktioner

VARNING!


Undvik att spilla vätska i Pocketalker, eftersom detta kan skada kretskortet och upphäva garantin.

- 1. Använd en trasa med alkoholhaltig lösning eller 3% väteperoxid för att rengöra utsidan av Pocketalker och hörlurssladden. Trasan du använder för att torka ska vara fuktig, inte helt våt (se försiktighetsprincip nr 5). Torka försiktigt av enheten. Att trycka hårt kan få vätska att pressas ut och komma in i enheten (se försiktighetsåtgärd nr 5).*
- 2. Pocketalker kan rengöras grundigt med "desinfektionsservetter med blekmedel eller alkohol". Vi kan dock inte garantera att färg / märken inte uppstår på enheten på grund av blekmedel.*
- 3. Byt ut skumkuddarna i hörlurarna eller använd hörlursöverdrag för engångsbruk vid varje ny användare. (Kuddar / skydd för öronproppar / hörlurar finns att köpa från Wililams Sound).*
- 4. Om du använder en mikrofonplugg (MIC 014-R), byt till mikrofonskydd för engångsbruk (WND 012) vid varje ny användare. (Både MIC 014-R Plug-In Microphone och WND 012 mikrofonskydd för engångsbruk finns tillgängligt via Williams Sound. WND 012 säljs i förpackningar om 100).*
- 5. Spraya eller håll inte vätska direkt på enheten. Applicera rengöringsmedel på en bomullstuss eller bomullspinne för att rengöra Pocketalker. Tryck inte hårt. Det är mycket viktigt att ingen vätska av något slag kommer in i enhetens elektronik (dvs. hörlursingången, mikrofoningången, USB-laddningsingången, den interna högtalaren, den interna mikrofonen, volymomkopplaren, tonkontrollen eller omkopplaren för T-spolen).*

Specifikationer

Personlig förstärkare modell PKT 2.0

Mått:	4,9" L x 2,0" B x 1,0" H. (124 mm x 51 mm x 25 mm) (inkluderar inte klämma eller mikrofonenhet)
Vikt:	3,1 oz. (88 gram) (med batterier)
Färg / material:	vitt ABS / plastfodral i polykarbonat.
*Batterityp:	Två (AAA), antingen 1,5 VDC alkaliska * eller 1,2 VDC NiMH uppladdningsbara * (Williams Sound BAT 010-2 alkalisk eller BAT 022-2 NiMH)
Batteritid:	Upp till 105 timmar (vanligt bruk) med BAT 010-2 (alkaliskt). Indikator för låg batterinivå: Ström "På" grönt ljus på frontpanelen blinkar.
**NiMH-batteriet laddning	Laddning: 16 timmar med BAT 022-2. Den röda lysdioden blinkar under laddningen. Slut på laddning: Röd lysdiod lyser fast. OBS: Laddning kräver laddningskit, BAT KT8 (tillval).
Mikrofon:	Intern, rundupptagande MEMS-mikrofon(mikro-elektro-mekaniskt system). Tillval, extern, rundstrålade plug-in mikrofon med skumgummi och vindsydd. 3,5 mm monoplug (MIC 014-R)
T-spole:	Intern med på / av-brytare och LED-indikator.
Tonkontroll:	Extern vridreglage gör att användaren kan justera hög / låg frekvens för att optimera hörseln.
***Balanskontroll:	Justerar volymbalansen vänster / höger
Ström / volymkontroll:	Extern vridreglage för volymkontroll med integrerad strömbrytare.
Mikrofonplugg:	3,5 mm, stereominikontakt. Tip=Mic-signal, Ring=NC, Ärm=Jrd.
Hörlursuttag:	3,5 mm, stereominikontakt. Tip=Vänster/Mono, Ring=Höger, Ärm=Jrd.
Tillbehör:	Clips: CLP 014; Detta används för att fästa MIC 014 på kläder, till exempel på jacka eller skjorta. Halsrem: RCS 003; Gör det möjligt för användning runt halsen eller runt armen. 3,5 mm förlängningssladd: WCA 007 WC; sträcker sig till en extern mikrofon upp till 3,66 m. Stereo öronproppar / Hörlurar / Hals slinga: EAR 042 / HED 024, HED 036 / NKL 001-S (stereo) hals slinga Mono öronproppar / hörlurar / hals slinga ***: EAR 013, EAR 008, EAR 022, EAR 041 / HED 021, HED 027 / NKL 001 (mono) hals slinga. Laddningskit: BAT KT8 (internationell)

Godkännanden:	CE (märkning 1), RoHS (märkning 2), FCC, IC, WEEE (märkning 3)
	
Garanti:	5 år, för arbete och material (90 dagar på tillbehör)
Elektriska specifikationer (1 kHz sinusvåg referensnivå) typiskt	
Uteffekt:	52 mW (max) til 32 ohm (stereo)
ALC:	Automatisk nivåkontroll; Begränsar maximal nivå
Fövrängning:	1 % THD (max)
Max. förstärkning:	63 dB v/2,5 kHz (Ton = Hög)
Drifttemperatur:	41°F till 104°F (5°C till 40°C)
Frekvenssvar	
Tonreglering vid hög position:	2,7 dB boost vid 5 kHz, 6,7 dB skär vid 400 Hz.
Tonreglering vid mittposition:	0,6 dB skär vid 5 kHz, 2,9 dB skär vid 400 Hz.
Tonreglering vid låg position:	2,0 dB skär vid 5 kHz, 3,0 dB boost vid 400 Hz.

SPECIFIKATIONER SOM ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE.

*Batteriokopplaren måste vara i rätt läge för den typ av batteri som används.

**Laddning kräver (tillval) laddningskit BAT KT8 (internationell).

***När du använder mono-öronproppar, hörlurar eller halsslinga måste balanskontrollen på Pocketalker ställas in helt moturs (till "mono" -läget) för bästa volym och batteritid.

Pocketalker är inte avsedd att användas som en hörapparat. Williams Sound rekommenderar att alla personer som upplever hörselnedsättning undersöks av en läkare / audionom för att hitta orsaken innan du använder en ljudförstärkare som Pocketalker.

Akustiska specifikationer för hörlurar som rekommenderas för användning med Pocketalker publiceras på vår webbplats.

Märkning 1: CE-godkännande gäller inte om produkten inte uppvisar CE-märkning.

Märkning 2: RoHS3: Direktiv 011/65 / EU + 2015/863 / EU

Märkning 3: WEEE: Direktiv 2012/19 / EU


Denna produkt täcks av det europeiska direktiven ovan, inklusive modifieringar, avfall av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Återvinn produkten och tillbehören i enlighet med nationella bestämmelser.

FCC-försäkran om överensstämmelse:

Enheten uppfyller avsnitt 15 i FCC-reglerna. Följande villkor gäller för användningen: (1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning och (2) denna enhet måste godta eventuella störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad användning.

Obs! Den här enheten har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. De här gränserna har utformats för att tillhandahålla skäligt skydd mot skadlig störning i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, kan den orsaka störningar på radiokommunikationer. Det är inte möjligt att helt garantera störningsfrihet i en enskild installation. Om utrustningen verkar orsaka störningar i radio- eller TV-mottagning, kan detta fastställas genom att utrustningen stängs av och sätts på. Användaren bör därefter försöka åtgärda störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en erfaren radio- eller TV-tekniker för att få hjälp.

 **WARNING!** Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen tillåts av den part som ansvarar för konformiteten kan medföra att användarens rätt att använda utrustningen upphör

Industry Canada Statement:

Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux conditions suivantes:

- (1) l'équipement concerné ne doit pas causer d'interférences, et*
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.*

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denna klass B digitala apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

Begränsad garanti

Williams Sounds produkter är designade, konstruerade och tillverkade under noggrant kontrollerade förhållanden för att ge dig många års pålitlig användning. Williams Sound garanterar Pocketalker PKT 2.0 personlig förstärkare mot defekter i material och utförande i fem (5) år. Under de första fem åren från inköpsdatumet kommer vi omedelbart att reparera eller byta ut Pocketalker PKT 2.0 personlig förstärkare.

Mikrofoner, öronproppar, hörlurar, batterier, kablar, bärväskor och alla andra tillbehör har 90 dagars garanti. Halsslingor har ett års garanti.

WILLIAMS SOUND HAS NO CONTROL OVER THE CONDITIONS UNDER WHICH THIS PRODUCT IS USED. WILLIAMS SOUND, THEREFORE, DISCLAIMS ALL WARRANTIES NOT SET FORTH ABOVE, BOTH EXPRESS AND IMPLIED, WITH RESPECT TO THE POCKETALKER® 2.0 AMPLIFIER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WILLIAMS SOUND SHALL NOT BE LIABLE TO ANY PERSON OR ENTITY FOR ANY MEDICAL EXPENSES OR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY ANY USE, DEFECT, FAILURE OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT, WHETHER A CLAIM FOR SUCH DAMAGES IS BASED UPON WARRANTY, CONTRACT, TORT OR OTHERWISE. THE SOLE REMEDY FOR ANY DEFECT, FAILURE OR MALFUNCTION OF THE PRODUCT IS REPLACEMENT OF THE PRODUCT. NO PERSON HAS ANY AUTHORITY TO BIND WILLIAMS SOUND TO ANY REPRESENTATION OR WARRANTY WITH RESPECT TO THE POCKETALKER® 2.0. UNAUTHORIZED REPAIRS OR MODIFICATIONS WILL VOID THE WARRANTYPOCKETALKER® 2.0.

Obehöriga reparationer eller modifieringar upphäver garantin. Ovanstående undantag och begränsningar ska inte och bör inte tolkas som ett brott mot de obligatoriska bestämmelserna i tillämplig lag. Om någon del eller begrepp i friskrivningen anses vara olaglig, ogenomdrivbar eller strider mot tillämplig lag från en behörig domstol, ska giltigheten för de återstående delarna av denna friskrivning inte påverkas och alla rättigheter och skyldigheter ska tolkas och verkställas som om denna begränsade garanti inte innehåller någon speciell del eller term som anses ogiltig. Om du har några problem med systemet, ring support gratis:

1-800-328-6190 (USA)

1-952-943-2252 (utanför USA)

Produsent

WILLIAMS AV

10300 Valley View Rd • Eden Prairie, MN 55344

800-843-3544 / 952-943-2252 • FAX: 952-943-2174

Nettsted: www.williamsav.com

E-post: info@williamsav.com