

NanoCare vaxfilter


NanoCare vaxfilter skyddar hörapparaten mot öronvax. Använd alltid NanoCare vaxfilter i din hörapparat. I annat fall upphör hörapparattens garanti att gälla.

NanoCare vaxfiltersystem består av följande delar:

1. Styrpinne
2. Utdragskrok
3. Vaxfilter



NanoCare levereras i en förpackning med 8 st vaxfilter. Vaxfiltret är monterat på ena änden av styrpinnen.

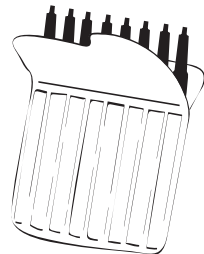

Byta NanoCare vaxfilter

Hörapparat med ventilerad ear-tip

Ear-tip behöver inte avlägsnas från earwire.

Hörapparat med öppen ear-tip



Dra av ear-tip från earwire.

Hörapparat med individuell ear-tip



Avlägsna INTE ear-tip från earwire.


1. För in utdragskroken i det begagnade vaxfiltret som sitter i ljudutgången.
2. Dra vaxfiltret rakt ut.

Ventilerad ear-tip och individuell ear-tip

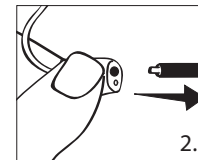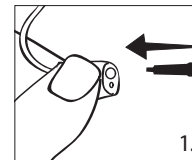

Öppen ear-tip

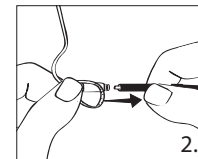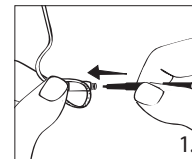


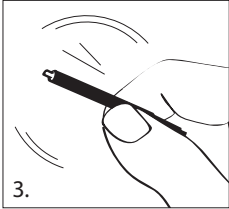


3. Vänd styrpinnen så att det nya vaxfiltret hamnar i rätt läge för montering.




4. Placera styrpinnen i ljudutgången och tryck varsamt fast vaxfiltret på hörtelefonen.

5. Dra styrpinnen rakt ut. Det nya vaxfiltret släpper automatiskt från styrpinnen och sitter kvar i ljudutgången när styrpinnen dras ut.

Ventilerad ear-tip och individuell ear-tip

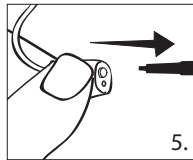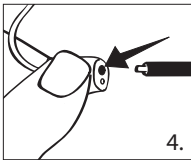

Öppen ear-tip

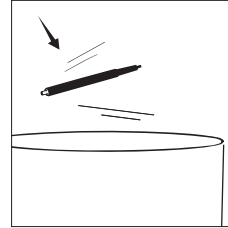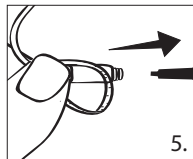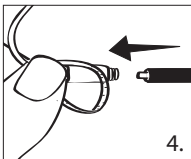

När vaxfiltret har bytts ut kastas det tillsammans med styrpinnen. Återanvänd *aldrig* ett vaxfilter.

Hur ofta man behöver byta NanoCare vaxfilter är mycket individuellt. Det beror bland annat på hur mycket öronvax man producerar.

Om du har frågor om NanoCare vaxfilter, kontakta din audionom.

Viktigt

Om vaxfiltret inte sitter ordentligt fast ska det bytas mot ett nytt. Om vaxfiltret mot förmodan lossnar då ear-tip är placerat i hörselgången, kontakta läkare. Försök inte själv ta bort vaxfiltret från hörselgången.