

Bruksanvisning

OTICON | **ConnectLine**
Streamer Pro 1.3A



Made for



iPod



iPhone



iPad



Works with
Android™

oticon
PEOPLE FIRST

Tack

Tack för att du har valt vår produkt för att höra bättre.

Vi har lagt stor omsorg på att se till att din nya Streamer håller högsta kvalitet och vi hoppas att du får mycket glädje av den.

Oticon Streamer ansluter olika ljudkällor till dina hörapparater så att de fungerar som ett trådlöst headset. Streamer överför ljudet till båda hörapparaterna vilket ger en bättre ljudupplevelse.

Den fullständiga systembeskrivningen finns online på www.oticon.se/connectline. Här finns det interaktiva presentationer, instruktionsfilmer och en supportsektion med vanliga frågor och svar.

Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen noga innan du börjar använda enheten för att få största möjliga nytta av din nya Streamer. Bruksanvisningen beskriver de viktigaste funktionerna som är bra att känna till innan du börjar använda din Streamer. Om du har ytterligare frågor kring skötsel och hantering av din Streamer, rekommenderar vi att du kontaktar din audionom.

Avsedd användning

Streamer är avsedd att användas tillsammans med Oticons hörapparater som klarar trådlös kommunikation. Streamer fungerar som central enhet i kommunikationen mellan hörapparater och andra enheter, t.ex. mobiltelefon.

Streamer kan anslutas till många olika externa ljudkällor så att du kan höra TV-ljud bättre eller föra samtal via din mobiltelefon osv.

Streamer fungerar som en fjärrkontroll med vilken du kan justera hörapparaternas volym och byta program.

Din Streamer kan anslutas till iPhone 4 eller senare version, vilket gör det möjligt att styra Streamers funktioner, via ConnectLine app.

”Tillverkad för iPod”, ”Tillverkad för iPhone” och ”Tillverkad för iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör har utvecklats specifikt för anslutning till iPod, iPhone eller iPad, och att det har certifierats av tillverkaren för att uppfylla Apples standarder för prestanda. Apple ansvarar inte för användningen av denna enhet eller dess efterlevnad av säkerhetsstandarder och regelverk. Notera att den trådlösa prestandan kan påverkas vid användning av detta tillbehör tillsammans med en iPhone eller en iPad.

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc. Android-roboten är reproducerad eller modifierad baserat på underlag som skapats och delats av Google och används enligt de villkor som beskrivs i ”Creative Commons 3.0 Attribution License”.

VIKTIGT!

Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda din Streamer. Den innehåller diverse förklaringar och viktig information om användning och skötsel av Streamer och batterier.

Innehåll

Förpackningens innehåll	8
Översikt	11
Varningar	12
Grundläggande funktioner - första användningstillfället	
Använda Streamer med halsband	16
Använda Streamer utan halsband	18
Sätta på och stänga av Streamer	20
Ladda Streamer	22
Indikator för svagt batteri	24
Fjärrkontroll för hörapparater	28
Koppla ihop Streamer med en mobiltelefon och andra enheter	30
Ta bort ihopkoppling	32

Fortsätter på nästa sida

Primära funktioner	
Anslutning/streaming	34
Mobiltelefon	35
ConnectLine telefonadapter	42
ConnectLine mikrofon	44
ConnectLine TV-adapter	46

Sekundära funktioner	
ConnectLine App	48
Anslutning/streaming	49
Musik/ljudsladd	50
Ljudsladd för headset	52
Musik/ljud - trådlöst	54
PC-headset - trådlöst	56
Telespole (inbyggd)	58
FM-mottagare (tillval)	60

Ytterligare information	
Undvik värme, fukt och kemikalier	62
Rengöring och underhåll	63
Tillbehör och reservdelar	64
Teknisk information	67
Index	70

Förpackningens innehåll

Streamer Pro - vad finns i förpackningen?

Förpackningen innehåller följande artiklar:



Din nya Streamer Pro



Halsband - medium (sidan 17)



Halsband - lång (sidan 17)

Låda 1



Laddare (sidan 22)

Strömförsörjningen varierar mellan olika länder.

Låda 3



Skyddshölje (sidan 64)

Låda 2

USB-sladd för laddning (sidan 22)



Stereosladd 3,5 mm minitele för MP3/musik (sidan 49)


Ljudsladd för telefoning via dator (sidan 52)



Denna bruksanvisning



Översikt

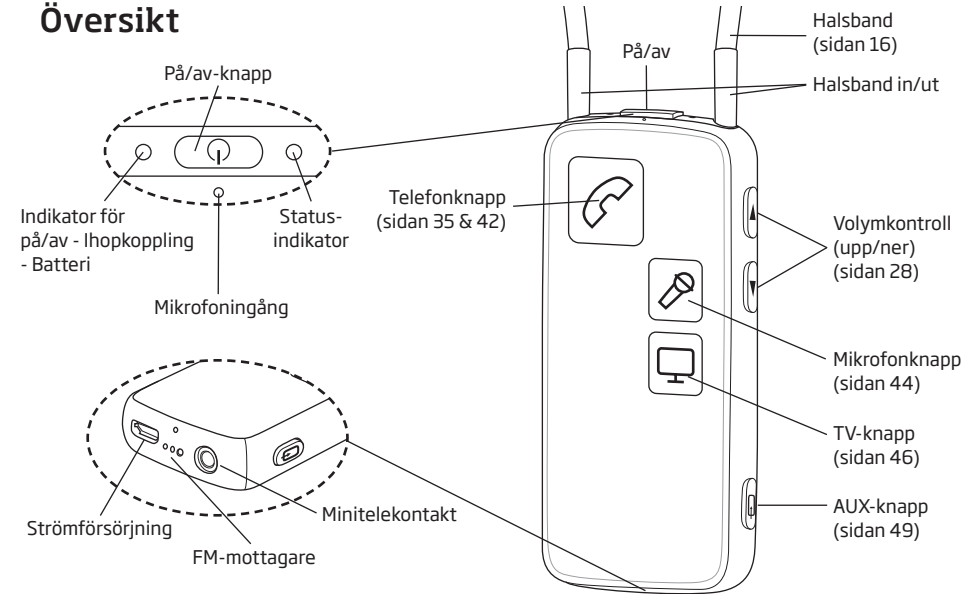

Varningar

För att undvika risker bör du sätta dig in i denna varningstext och innehållet i bruksanvisningen innan du använder Streamer.

Produkter som ska anslutas till extern utrustning

Säker användning av Streamer med 3,5 mm minitelesladd är beroende av den externa signalkällan. När 3,5 mm minitelesladden är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna utrustning efterleva IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Säkerheten för uppladdning med endast USB-sladden avgörs av den externa utrustningen. När USB-sladden är ansluten till nätströmsdriven utrustning, måste denna utrustning vara UL-godkänd eller efterleva IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Explosionsrisk

Det finns en risk för att batteriet kan explodera och orsaka allvarlig skada. Utsätt aldrig Streamer för extrem hetta genom att placera enheten i en ugn, mikrovågsugn, öppen eld eller genom att lämna den i en parkerad bil i solen.

Varningar

Kvävningsrisk

Streamer är inte en leksak och ska förvaras utom räckhåll för barn och alla andra som skulle kunna svälja delar eller skada sig själva på annat sätt. Var särskilt uppmärksam på de mindre komponenterna, så att inga barn kan svälja dem.

Om en del har svalts ned, uppsök läkare omedelbart.

Störningar och implantat

Streamer är utformad för att efterleva stränga standarder för internationell elektromagnetisk kompatibilitet. Streamer kan dock orsaka störningar för medicinska enheter som t.ex. defibrillatorer och pacemakers.

- Kontakta implantatets tillverkare för att få information om störningsrisken.
- Avlägsna genast Streamer om du misstänker att den orsakar störningar. Använd inte Streamer utan rådgör med din audionom eller teknisk expertis.

Störningar kan också orsakas av spänningsfall, flygplatsdetektorer, elektromagnetiska fält från andra medicinska enheter, radiosignaler och elektrostatiska urladdningar.

Varningar

Använda halsbandet

Om halsbandet skulle fastna i något medan du bär den, är den utformad så att den lossnar automatiskt. Försök därför aldrig korta eller modifiera halsbandet. Halsbandet ska inte användas till barn som väger mindre än 11 kg.

Användning i bilen

Om du använder Streamer med mobiltelefonen medan du kör kan du bli distraherad. Om trafikreglerna tillåter eller kräver det, kör åt sidan och parkera innan du använder mobiltelefonen.

Användning på flygplan

Använd inte Streamer ombord på flygplan, om inte flygplanspersonalen uttryckligen gett dig tillstånd.

Varningar

Batteribyte

Försök inte öppna batterifacket, eftersom det kan skada batteriet. Servicegarantin gäller inte vid tecken på ingrepp.

Kompatibla mobiltelefoner

På www.oticon.se/connectline kan du finna de mobiltelefoner som testats av Oticon och som vid testtillfället uppfyllde kraven för kompatibilitet med ConnectLine. Oticon ansvarar generellt inte för sådan kompatibilitet. I synnerhet ansvarar inte Oticon för inkompatibilitet orsakad av framtida uppdateringar av mobiltelefonerna eller för inkompatibilitet med mobiltelefoner som inte ingått i dessa tester. Oticon har ingen ekonomisk ersättningskyldighet för mobiltelefoner som inte fungerar som förväntat. Läs kompatibilitetslistan innan du köper en ny mobiltelefon.

Grundläggande funktioner - första användningstillfället

Använda Streamer med halsband

Halsbandet är en integrerad del av Streamers elektroniska system. Det fungerar som en antenn som överför ljud till dina hörapparater.

För bästa möjliga ljudkvalitet och längsta möjliga användningstid, ska Streamer alltid användas tillsammans med något av de medföljande halsbanden. Streamer levereras med två halsband, ett långt och ett medium.



VIKTIGT!

Var försiktig när du använder halsbandet. Av säkerhetsskäl (för att undvika kvävning) lossnar halsbandet automatiskt om den fastnar i något. Halsbandet får inte kortas eller ändras på något sätt, t.ex. med en knut. Om halsbandet går sönder kan det inte repareras utan måste ersättas med ett nytt. Rådgör med din audionom.

Montera halsbandet

Halsbandet trycks fast i hålen upptill på Streamer.

När du talar med någon via Streamer, måste din röst kunna fångas upp av den inbyggda mikrofonen.

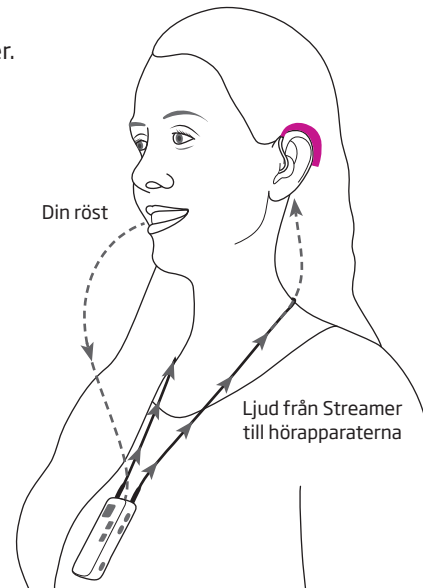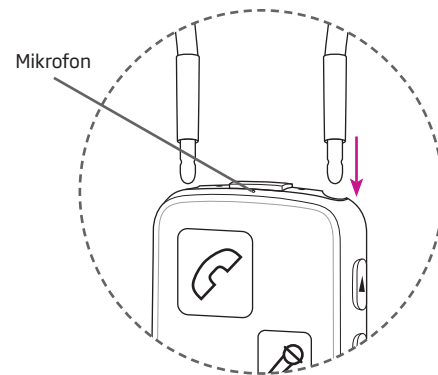


Använda Streamer utan halsband

Om du använder Streamer utan halsbandet måste avståndet till hörapparaterna vara mindre än en meter. Om ljudet försvinner rekommenderar vi att du använder halsband istället.

Om du använder Streamer utan halsband ökar strömförbrukningen och den maximala användningstiden minskar till fem timmar, vid full laddning.

VIKTIGT!

Byt genast ut halsbandet om det är trasigt.

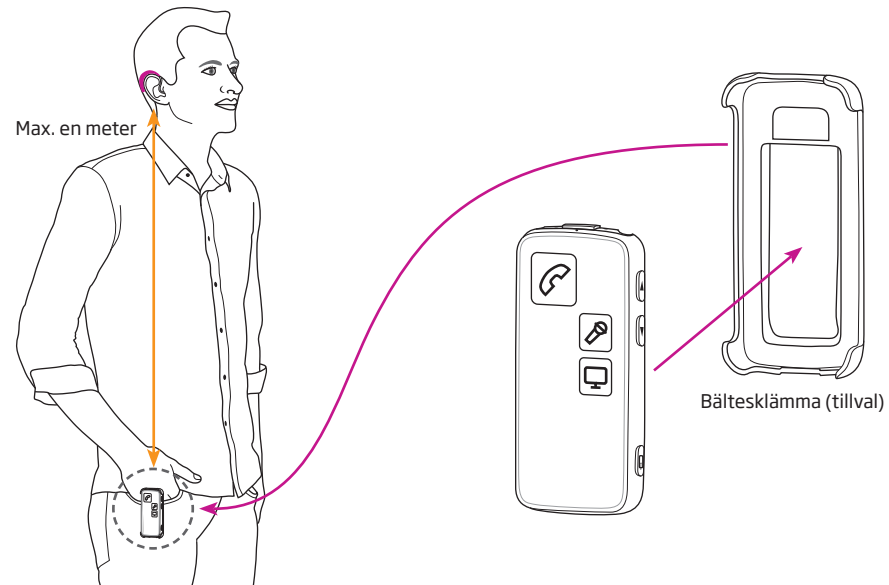

Sätta på och stänga av Streamer

Sätta på

Tryck på av/på-knappen upptill på Streamer i cirka två sekunder tills alla lampor framtilt blinkar.


Släpp av/på-knappen. Nu ska strömindikatorn upptill på Streamer lysa grönt.

Om det inte går att sätta på Streamer, kontrollera att batteriet är laddat (sidan 22).

Du kan kontrollera status genom att trycka kort på på/av-knappen.

Stänga av

Tryck in på/av-knappen i cirka två sekunder tills den gröna strömindikatorn slocknar.

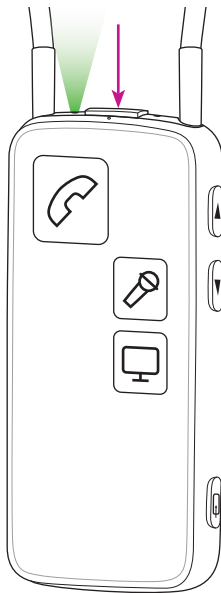

Ström på/av		
Status	Framsida	Beskrivning
	 	Streamer är avstängd
	 	När du trycker på på/av-knappen i cirka två sekunder, tänds alla lampor i några sekunder för att indikera att Streamer är påslagen
	 	Streamer är påslagen och klar att användas


Ladda Streamer





Streamer har ett laddningsbart batteri. Vi rekommenderar att du laddar Streamer en gång per dag för bästa prestanda.

Sätt in kabeln från den bifogade laddaren i USB-uttaget i underdelen på Streamer (A). Glöm inte att sätta i laddaren i strömuttaget.

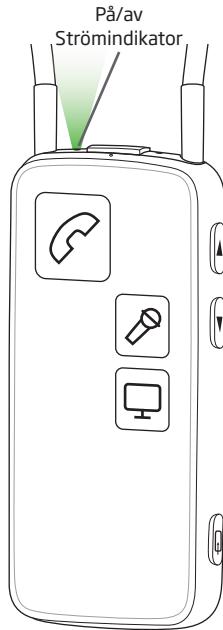
Laddningen indikeras av en blinkande grön indikator upptill. När Streamer är fulladdad lyser indikatorn med ett fast grönt sken.

Under laddning i avstängt läge blinkar en grön indikator upptill. När Streamer är fulladdad slocknar indikatorn.




Laddning		
Status	Framsida	Beskrivning
 		Laddning - i avstängt läge - statusindikatorn blinkar grönt
 		Laddning - när Streamer är påslagen (eller används) - statusindikatorn växlar mellan starkt och svagt grönt.

 Blinkar  Avtar

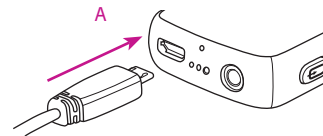

Indikator för svagt batteri

Streamer indikerar **svagt batteri** (cirka 20 minuters användningstid kvar) med fast rött sken, och indikerar mycket svagt batteri (cirka fem minuters användningstid kvar) med ett blinkande rött sken.

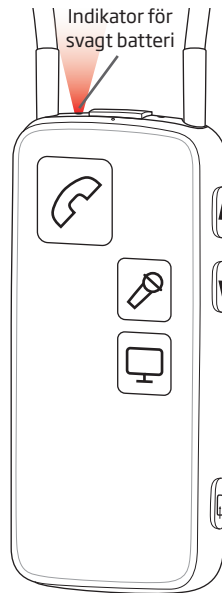

Indikator för svagt batteri		
Status	Framsida	Beskrivning
		Svagt batteri - cirka 20 minuters användningstid kvar vid ljudöverföring till hörapparater
		Mycket svagt batteri - cirka fem minuters driftstid kvar vid ljudöverföring till hörapparater

Fast sken Avtar

VIKTIGT!

Batteriet bör inte laddas ur helt. Svagt batteri - cirka 20 minuters användningstid kvar vid användning tillsammans med hörapparater. Du kan inte byta batteri själv.

Batterikapacitet och laddningstid	
Batterikapacitet med halsband	Upp till tio timmars normal användning: två timmars telefontid, sex timmars TV-tid och två timmars standby (efter två år är kapaciteten cirka åtta timmars normal användning).
Batterikapacitet utan halsband	Upp till fem timmars normal användning: En timmes telefontid, tre timmars TV-tid och en timmes standby.
Laddningstid	Två timmar för full laddning med den medföljande laddaren.
Fjärrkontroll	När Streamer är avstängd kan den användas som fjärrkontroll i upp till sex månader på en full laddning.
Förväntad batterilivslängd	Batteriet i Streamer fungerar i mer än två år om det laddas dagligen. Din audionom kan byta batteri åt dig.

Fjärrkontroll för hörapparater

Volym upp/ner

Tryck kort på volym upp eller ner för att ändra hörapparaternas volym. Du hör bekräftande klickljud i hörapparaterna.

Byta program i hörapparaterna


Du kan byta program genom att **hålla in volym upp eller ner** i mer än en sekund. När du byter program indikeras detta med ett ljud i dina hörapparater.

Aktivera "tyst läge" i hörapparaterna

Du kan aktivera "tyst läge" genom att **trycka på volym upp OCH ner samtidigt i en sekund**.

VIKTIGT!

- "Tyst läge" går endast att aktivera i nyare hörapparatsmodeller från Oticon. Kontakta din audionom för mer information.
- Även om Streamer är avstängd, kan den användas som fjärrkontroll till hörapparaterna.

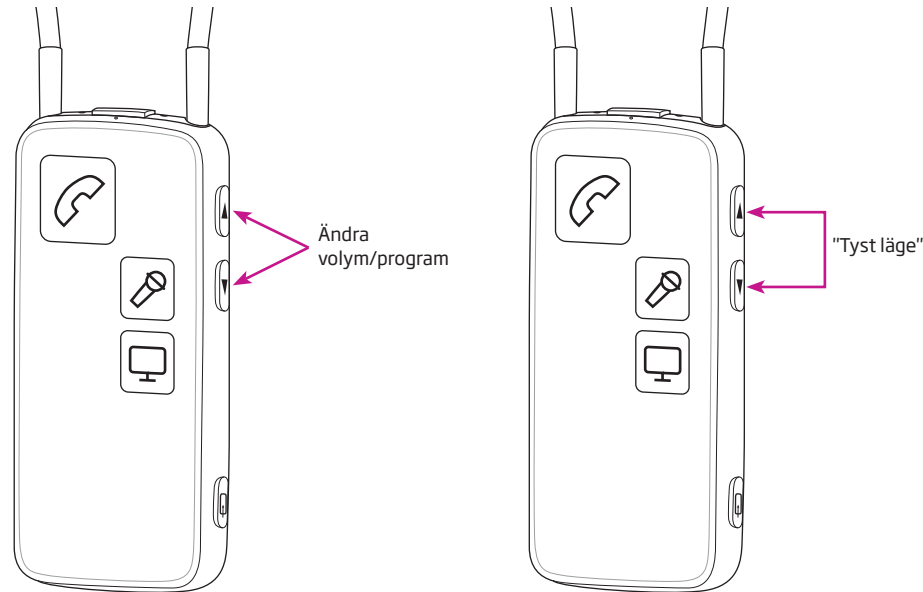


Koppla ihop Streamer med en mobiltelefon och andra enheter

Innan du kan använda Streamer tillsammans med andra enheter som t.ex. mobiltelefoner, måste enheterna kopplas ihop.

1. Aktivera ihopkopplingsläge för Streamer.

Tryck in av/på-knappen i cirka fem sekunder tills indikatorn blinkar blått.

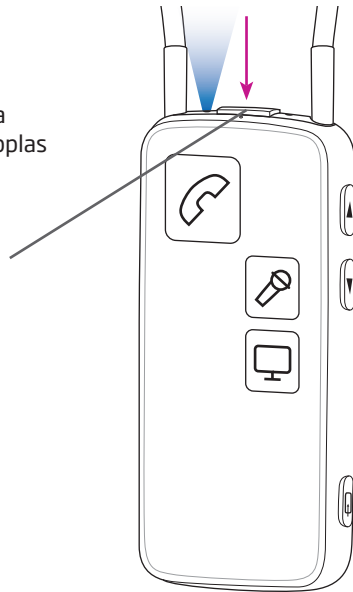


2. Aktivera ihopkopplingsläge för andra enheten (t.ex. en mobiltelefon).

Se inställningar i din mobiltelefon. Vi rekommenderar att du läser bruksanvisningen till mobiltelefonen vid ihopkoppling.

3. Den andra enheten (mobiltelefonen) kräver ofta en PIN-kod.


PIN-koden för Streamer är **0000** (fyra nollor).



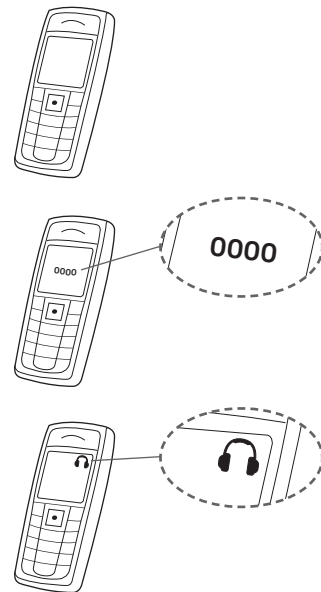



4. Efter slutförd ihopkoppling visar mobiltelefonen ofta en hörlurssymbol. Samtidigt lyser Bluetooth-indikatorn på Streamer med ett fast blått sken.

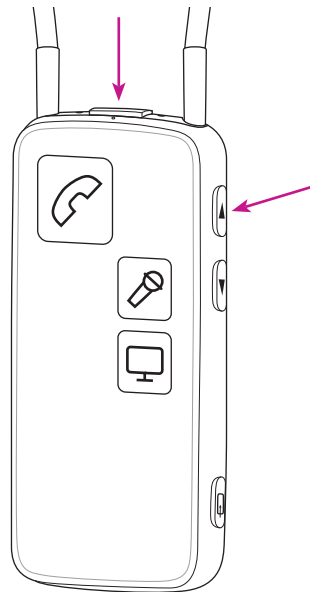

Ta bort ihopkoppling

Om du har problem med ihopkopplingen, kan du ta bort alla ihopkopplingar genom att samtidigt trycka på strömbrytaren och volym upp i tre sekunder.



Ihopkoppling		
Status	Framsida	Beskrivning
 		Streamer i ihopkopplingsläge
 		Ihopkoppling slutförd
 		Streamer på

 Fast sken  Blinkar

Primära funktioner

Anslutning/streaming

ConnectLine Streamer är inställd och optimerad för vardagsanvändning i följande situationer:


1. Användning av mobiltelefon via Bluetooth* (sidan 35).

Användning av ConnectLine telefonadapter (säljs separat) med fast telefon* (sidan 42).

2. Användning av ConnectLine mikrofon (säljs separat), som underlättar samtal med en person på avstånd eller i bullriga miljöer (sidan 44).


3. Användning av ConnectLine TV-adapter (säljs separat) för trådlös överföring av TV-ljudet till dina hörapparater* (sidan 46).

* Hörapparaterna fungerar som ett trådlöst headset tillsammans med Streamer.

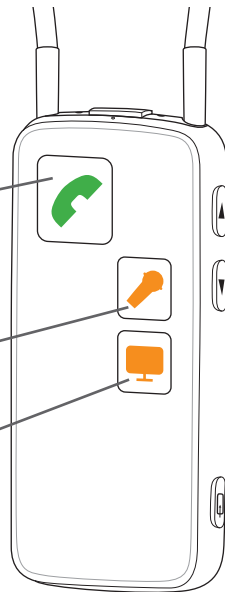

Om mobiltelefoni

För att ta emot eller ringa samtal när du använder Streamer, kontrollera att Streamer och mobiltelefon är ihopkopplade (sidorna 30-31), att enheterna är påslagna och inom räckvidden (tio meter). Din mobiltelefon indikerar ofta att den är ansluten till Streamer med en hörlurssymbol på mobiltelefonens display.

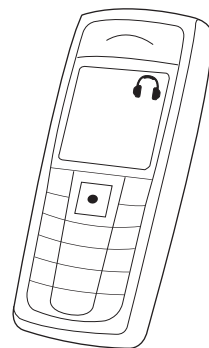


Besvara samtal

Se till att du kan tala in i mikrofonen på Streamer.

När din mobiltelefon ringer, hör du en signal i dina hörapparater. Samtidigt blinkar telefonknappen och statusindikatorn på Streamer grönt.

Tryck kort på telefonknappen på Streamer för att besvara samtalet. Du kommer då att höra en kort pip i hörapparaterna. Nu lyser telefonknappen och statusindikatorn med ett fast grönt sken.

Du avslutar samtalet genom att trycka kort på telefonknappen.

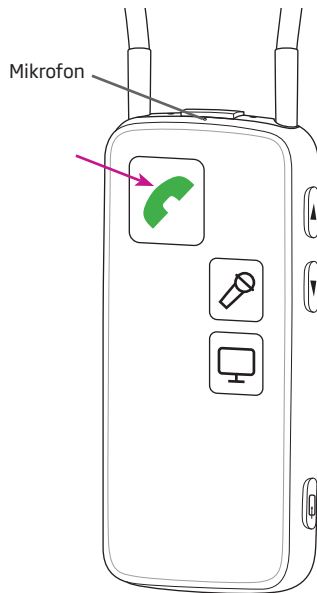

Besvara samtal		
Status	Framsida	Beskrivning
		Streamer påslagen och redo
		Telefonindikator och statusindikator blinkar grönt. Du hör en signal för inkommande samtal i dina hörapparater
		När samtalet har kopplats hör du ett pip som bekräftar att samtalet besvarats - nu kan du tala med personen i den andra änden.

Fast sken Blinkar


Ringa samtal








Se till att du kan tala in i mikrofonen på Streamer.

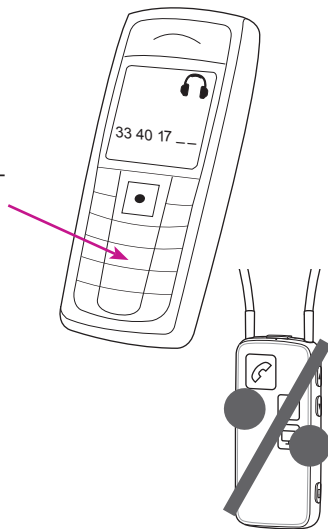För att ringa ett samtal behöver du bara använda mobiltelefonen. Du behöver inte göra något med Streamer. Slå **numret som vanligt** - samtalet kopplas sedan automatiskt till Streamer.

Telefonknappen på Streamer och statusindikatorn lyser grönt och du hör ett kort pip som bekräftelse i dina hörsapparater, som indikerar att samtalet nu är anslutet via Streamer och hörsapparaterna.

Du avslutar samtalet genom att kort trycka på knappen "avsluta samtal" på telefonen eller telefonknappen på Streamer.



Ringa samtal		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		När samtalet har kopplats hör du ett pip som bekräftar att samtalet besvarats - nu kan du tala med personen i den andra änden.

 Fast sken  Blinkar

Skräddarsy mobiltelefonens funktioner

Följande mobiltelefonfunktioner kan aktiveras eller inaktiveras av din audionom.

Neka samtal - på som standard

Du kan neka ett inkommande samtal genom att trycka kort på volymknappen på Streamer.

Röstuppringning - på som standard

Tryck kort på telefonknappen för att aktivera röstuppringning (om detta stöds av din mobiltelefon och du inte befinner dig inom räckvidden för en ConnectLine-telefonadapter).

Återuppringning av senaste nummer - på som standard

Tryck och håll in telefonknappen för att ringa upp det senast slagna numret (om detta stöds av din mobiltelefon).

Hänvisa samtal - på som standard

Tryck och håll in telefonknappen för att hänvisa ett samtal tillbaka till mobiltelefonen.

Alla knappar besvarar samtal - på som standard

Vid inaktivering kan du bara besvara samtal med telefonknappen på Streamer.


Aktivera inkommande (A2DP) anslutningar - av som standard

Om detta är aktiverat kan andra enheter som t.ex. en iPod, dator eller mobiltelefon aktivera/starta streaming av ljud, exempelvis inkommande musik som startats från en ansluten mobiltelefon.

ConnectLine telefonadapter


Streamer kan även användas med en vanlig fast telefon med hjälp av ConnectLine telefonadapter (säljs separat).

För mer information om hur du använder ConnectLine telefonadapter, se bruksanvisningen som medföljer denna produk.

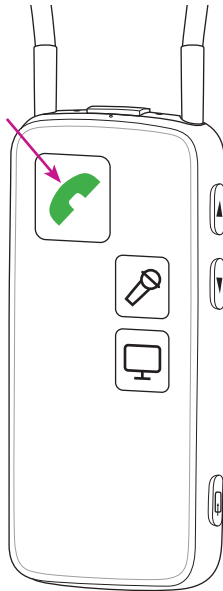

Tala i telefon		
Status	Framsida	Beskrivning
		Streamer påslagen och redo
		Streamer ansluten - du kan tala med personen i den andra änden.


Fast sken

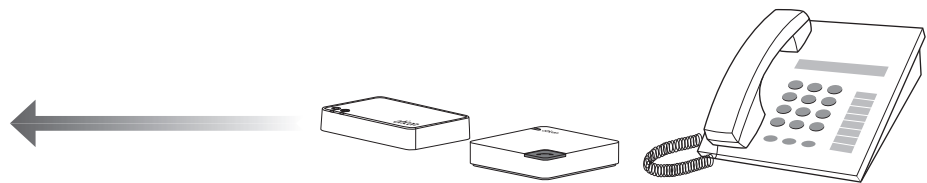

ConnectLine mikrofon


ConnectLine mikrofonen säljs separat. Den överför tal-ljudet från en person till dina hörapparater via Streamer.

För mer information om hur du använder ConnectLine mikrofon, se bruksanvisningen som medföljer.

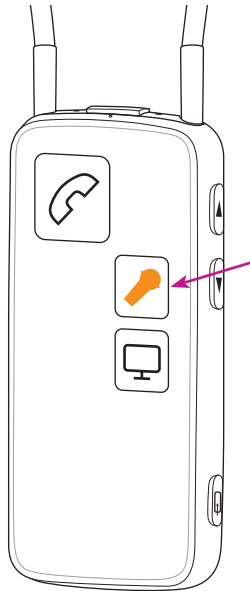

Ljud från ConnectLine mikrofon		
Status	Framsida	Beskrivning
		Streamer påslagen och redo
		När mikrofonen är ansluten överförs ljud från mikrofonen till hörapparaterna


Fast sken

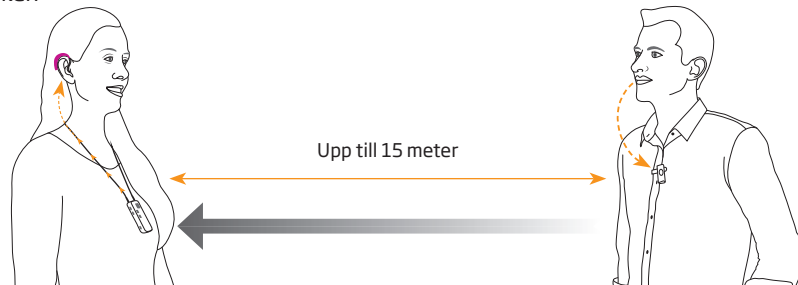

ConnectLine TV-adapter


ConnectLine TV-adapter säljs separat. Den överför ljud från TV:n via Streamer till dina hörapparater.

För mer information om hur du använder ConnectLine TV-adapter, se bruksanvisningen som medföljer produkten.

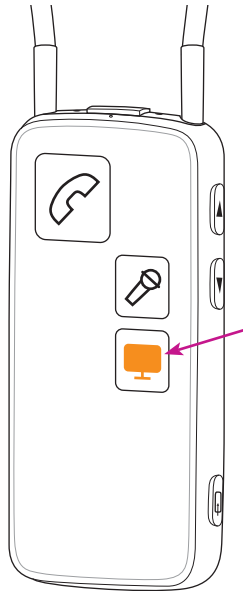

Titta på TV		
Status	Framsida	Beskrivning
		Streamer påslagen och redo
		Ansluta till TV
		Streamer ansluten - ljud från TV:n hörs i hörapparaterna

Fast sken Blinkar

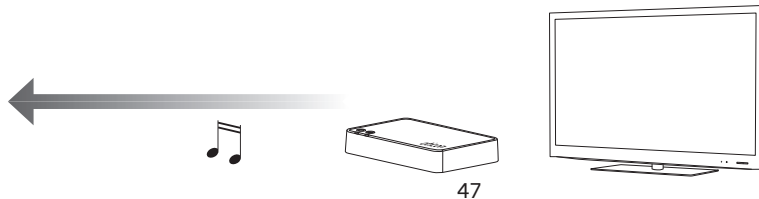

Sekundära funktioner

ConnectLine App

ConnectLine App för iPhone®, iPad®, iPod touch® och Android™ erbjuder ett intuitivt och diskret sätt att hantera hörapparaterna och ConnectLine-systemet. Dessutom kan användaren anpassa funktionerna i ConnectLine-systemet, vid behov.

Kan hämtas via App Store och Google Play™.




Besök vår hemsida för mer information:
www.oticon.se/connectline

ConnectLine App för iPhone, iPad och iPod touch fungerar med iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad mini med Retina-display, iPad mini, iPad (3:e och 4:e generationen), iPad 2 och iPod touch (5:e generationen) och kräver Streamer Pro 1.2 App eller senare version. Vid installation av ConnectLine App i iPad, sök efter iPhone-appar i App Store.
ConnectLine App för Android-smartphones och -surfplattor kräver Streamer Pro, mjukvaruversion 1.3 eller senare.
Besök www.oticon.se/connectline för mer information om kompatibilitet.

Anslutning/streaming

Streamer kan användas med många olika ljudkällor, t.ex. MP3-spelare, datorer osv.

Följande prioriteringar gäller.

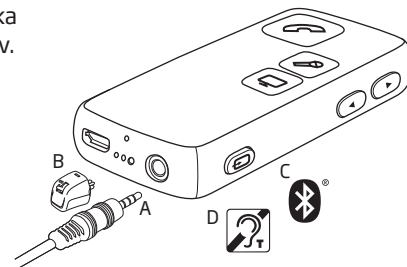


A	Prioritet 1	3,5 mm minitele in/ut (om ansluten)	Tryck kort på AUX-knappen	Sidan 50
B	Prioritet 2	FM (om anslutet)	Tryck kort på AUX-knappen	Sidan 60
C	Prioritet 3	Trådlöst Bluetooth (inbyggd)	Tryck kort på AUX-knappen	Sidan 54
D	Prioritet 4	Mottagare för teleslinga (inbyggd)	Tryck och håll in AUX-knappen i cirka två sekunder	Sidan 58





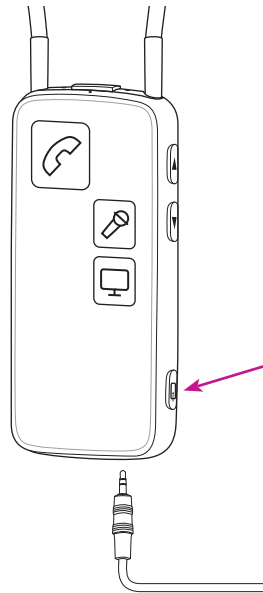

Musik/ljudsladd

Sätt i och anslut den medföljande minitelesladden för att lyssna på musik/ljud från olika ljudkällor.


När du vill lyssna på en extern ljudkälla, tryck kort på **AUX-knappen**. Om ljudsladden är ansluten startar överföring av ljudet.



50

Musik/ljud - sladd		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		Du hör ett kort pip följt av ljudet från enheten

  Fast sken

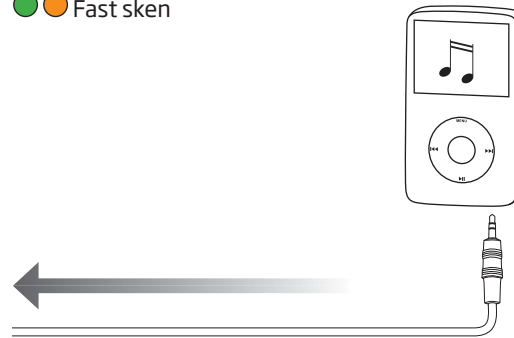


51

Ljudsladd för headset

Se till att du kan tala in i mikrofonen på Streamer.


Sätt in och anslut den medföljande minitelesladden och den medföljande sladden för telefonering så kan du använda dina hörapparater som ett headset tillsammans med din dator.

Du använder headset-funktionen genom att trycka kort på **AUX-knappen**.

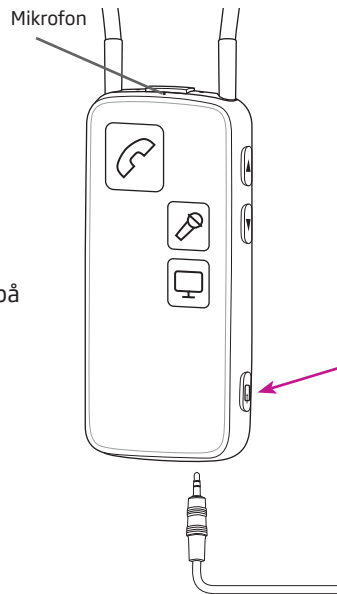

Ljudsladd för headset		
Status	Framsida	Beskrivning
		Streamer påslagen och redo
		Du hör ett kort bekräftelsepip - nu kan du tala med personen i den andra änden.

Fast sken

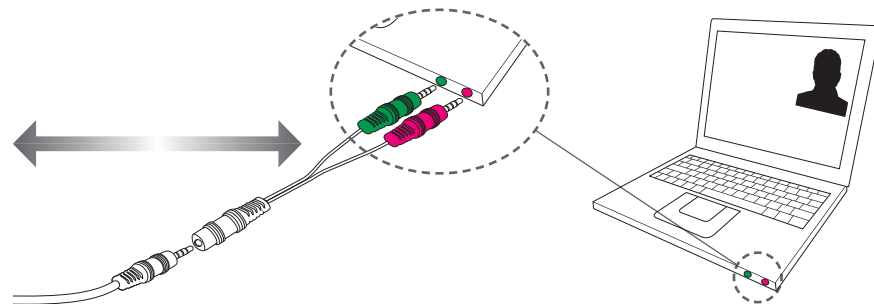


Musik/ljud trådlöst







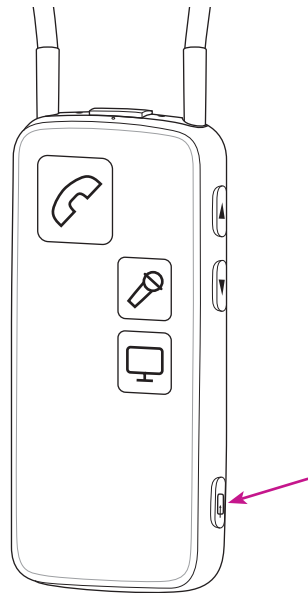


För att lyssna på musik/ljud trådlöst, t.ex. från en MP3-spelare eller en dator med inbyggt Bluetooth, kontrollera att enheten har kopplats ihop med Streamer (sidan 30), att båda enheter är påslagna och inom räckvidd (<10 meter).

För att lyssna på musik från t.ex. en mobiltelefon, tryck på AUX-knappen innan du startar musikspelaren.

Aktivera automatiska anslutningar - av som standard

Om din audionom har aktiverat denna funktion, kan iPods, datorer och mobiltelefoner automatiskt aktivera/starta överföring av ljud, t.ex. vid inkommande textmeddelanden eller musik startad från en ansluten mobiltelefon.



Musik/ljud - trådlöst		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		Streamer ansluter till musik/ljudenhet
  		När anslutningen är klar hör du ett kort bekräftelsepip följt av ljudet från FM-sändaren

  Fast sken  Blinkar




PC-headset - trådlöst







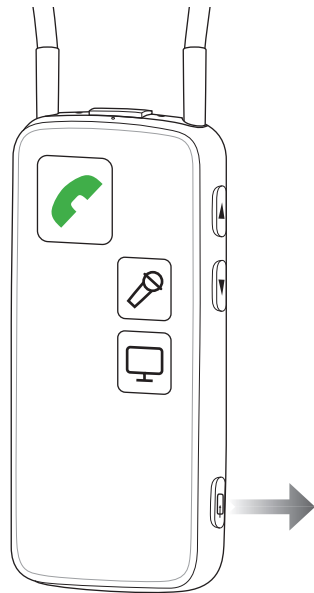


Se till att du kan tala in i Streamers mikrofon.

Vid ihopkoppling med en dator, kontrollera att Streamer kopplas ihop som en headset-enhet.


Vid användning av headset-funktionen, sker samtalskontroll från datorn.



56

Headset - trådlöst		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		Streamer ansluter till musik/ljudenhet
  		När anslutningen är klar hör du ett kort bekräftelsepip följt av ljudet från FM-sändaren

  Fast sken  Blinkar

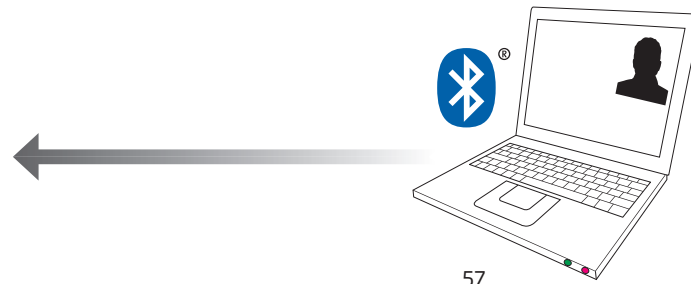


57







Telespole (inbyggd)

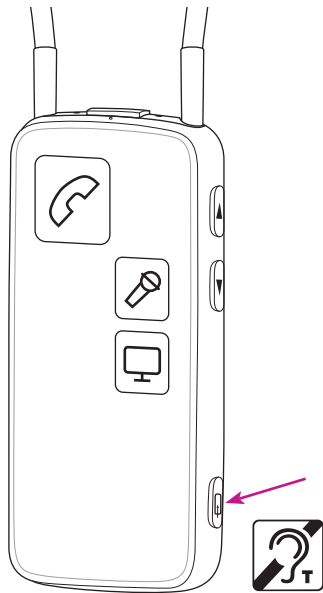Streamer har en inbyggd mottagare för teleslinga (telespole).

Du tar emot ljud via slingmottagaren genom att trycka in AUX-knappen i cirka två sekunder.

Observera: vid behov kan Streamer programmeras så att telespolen aktiveras med en kort knapptryckning.



Telespole		
Status	Framsida	Beskrivning
  		Streamer påslagen och redo
  		När anslutningen är klar hör du ett kort bekräftelsepip följt av ljudet från teleslingsystemet.

  Fast sken

FM-mottagare (tillval)

En FM-mottagare kan anslutas till FM-skon. Mottagaren tar emot FM-signaler från en FM-sändare, som vanligtvis bärs av en lärare.

Anslut FM-mottagaren och tryck kort på AUX-knappen. När FM-sändaren och mottagaren är synkroniserade på samma kanal, tas FM-signalen emot i hörapparaterna.

Om FM-mottagaren har en lägesväljare, välj läge 00.



60

FM		
Status	Framsida	Beskrivning
		Streamer påslagen och redo. FM är aktiverat och redo för synkronisering med FM-sändare.
		När anslutningen är klar hör du ett kort bekräftelsepip följt av ljudet från FM-sändaren

Fast sken

VIKTIGT!

Kontrollera att Streamer är påslagen och att den inte överför ljud till hörapparaterna när FM-kanalsynkronisering behövs.

61

Ytterligare information

Undvik hetta, fukt och kemikalier.

Driftstemperaturen för Streamer är 10-45°C.

Utsätt aldrig Streamer för extrem hetta genom att placera enheten i en ugn, mikrovågsugn, öppen eld eller genom att lämna den i en parkerad bil i solen. Det finns en risk för att enheten kan explodera och orsaka allvarlig skada.

Streamer får inte utsättas för fukt som t.ex. i en ångbastu, dusch eller kraftigt regn.

Streamer får inte utsättas för eller rengöras med rengöringskemikalier eller alkohol. Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion och myggmedel kan skada Streamer. Du ska alltid ta av Streamer innan du använder sådana produkter och se till att de hunnit torka innan du använder Streamer igen.

Rengöring och underhåll

Streamer är förseglad och kräver minimal skötsel. Smuts, fukt eller fett ska torkas av med en torr eller fuktig trasa. Du bör rengöra Streamer regelbundet. Mikrofoningången och kontakter måste hållas rena och fria från damm och smuts.

Streamer och halsband får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

Tillbehör och reservdelar

Skyddshölje

Om du behöver extra skyddshöljen, fråga din audionom.




Skyddshölje - med tryckknapp

Ett skyddshölje, mörkt eller ljust grått, med tryckknapp som underlättar enklare manövrar kan beställas hos din audionom.



Byta halsband

Reservhalsband, svarta eller vita, finns i tre storlekar: Kort (51 cm), medium (66 cm) och långt (81 cm) och kan beställas från din audionom.

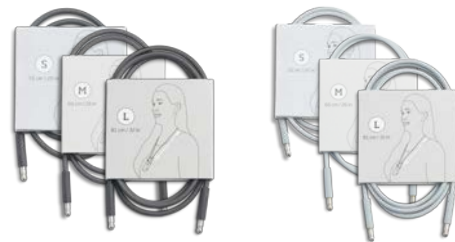

Bältesklämma

Du kan köpa en bältesklämma, svart eller vit, hos din audionom.



Teknisk information

Utöver Bluetooth-sändaren innehåller Streamer en radiosändare som använder en magnetinduktiv överföring som arbetar vid 3,84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är < -15 dB μ A/m vid 10 m.

Störningsvärdena från Streamer ligger under internationella gränsvärden för mänsklig exponering. Streamer efterlever internationella standarder gällande elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund av det begränsade utrymmet på enheten återfinns många av de relevanta godkännande märkningarna i detta dokument.

Enheten innehåller en modul där:

FCC ID: U28CL2STRM (nye numre indsættes)

IC: 1350B-CL2STRM

Enheten överensstämmer med del 15 i FCC-regelverket samt RSS-210 of Industry Canada.

Användande har följande två förbehåll:

1. Denna utrustning orsakar ej skadlig störning.
2. Denna enhet kan störas av yttre interferens, inklusive interferens som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Observera: Denna utrustning har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital klass B-enhet i enlighet med del 15 i FCC-regelverket.

Dessa gränser är avsedda att tillhandahålla ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsmiljö. Denna enhet använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier för att en viss installation inte kommer att orsaka störningar.

Om denna enhet orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att man stänger av och slår på enheten, uppmanas användaren att försöka rätta till detta genom en eller flera av följande åtgärder:

- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett annat nätuttag än det som mottagaren är anslutet till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Härmed deklarerar Oticon att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiven 1999/5/EC. Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global

CE 0682



Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.



NI 175

Index

A

A2DP-enhet. Se Musik, trådlöst
Aktivera "tyst läge" 28
Android 48
Antenn 16
App 48
Användarföreskrifter 3
Användning i bil 14
Avsluta samtal 38

B

Batteri 26
Kapacitet 26
Laddningsbart 22
Laddningstid 26
Livslängd 26
Svagt 24
Besvara samtal 36

Bluetooth 54
Byta program 28
Bältesklämma 18

C

ConnectLine
Mikrofon 44
Telefon 42
TV 46

D

Dator
Ljudsladd för headset 52
Musik/ljud - trådlöst 54
Musik/ljudsladd 50

F

Fast telefon 42
Fjärrkontroll 28
Flygplan, användning på 14
FM 60

FM-sko . Se FM
Fukt 62
Första användningstillfället 16

H

Halsband 16
Headset 9
Mobiltelefon 35
Sladd 52
Sladd för telefonering 52
Trådlöst 54, 56
Hetta 62
Hänvisa samtal 41
Hörlurar . Se Headset
Hörlurar . Se Headset

I

Ihopkoppling 30
Läge 30
Rengöring 32

iPhone 48

K

Kemikalier 62

L

Laddare 22
Laddning 22
Laddningsbart batteri 22
Ljud (musik) 50
Sladd 50
Lyssna på musik 50
Trådlöst 54
Ljud. Se musik
Ljudsladd för headset 52
Lyssna på ljud 50
Lyssna på musik 50

M

Mikrofon 44
Mikrofoningång 11

Minitelekontakt 11
Minitelesladd 50, 52
Mobiltelefon 35
Mobiltelefon, kompatibilitet 15
MP3-spelare 54
Musik 54
 Lyssna på musik 50
 Sladd 50
 Trådlöst 54

N
Neka samtal 40

P
PC. Se Dator
Personliga inställningar 40
PIN-kod 31
Prata i telefon 43
Produktöversikt 11
På/av 20

R
Rengöring 62, 63
Reservdelar 64
Ringa samtal 38
Röstuppringning 40

S
Samtal
 Avsluta 36, 38
 Besvara 36
 Hänvisa 41
 Neka 40
 Ringa 38
Skyddshölje 64
Sladd för telefonering 52
Sladd för telefonering 9
Sladd för telefonering för headset 52
Störningar 13, 68

T
Ta bort ihopkoppling 32
Teknisk information 67
Telefonadapter 42
Teleslinga 58
Telespole 58
Tillbehör 64
Trådlöst 54, 56
TV 46
Tyst läge 28

U
Underhåll 63
Utan halsband 18

V
Varningar 12, 13, 14, 15
Volym upp/ner 28

Å
Återuppringning av senaste nummer 40



0000171647000001

oticon
PEOPLE FIRST