

## Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator

Bruksanvisning





## Innehåll

Inledning	3
Bildöversikt CL100	4
<b>Installera telefonen</b>	
Ansluta telefonen	6
Ställa in ringsignalens volym	7
Ton-/pulsval (T/P)	7
TBR-omkopplare	7
Väggmontering	7
<b>Använda telefonen</b>	
T-slinga	8
Svara på inkommande samtal	8
Volym- och tonkontroll (inkommande ljud)	8
Ringa ett samtal	9
Justera utgående volym	9
Återuppringning	9
Återuppringning med knapparna med symbolerna * och #	9
Sekretess	9
Ställa in snabb- och kortnummer	10
Ringa ett snabb- eller kortnummer	10
<b>Övrigt</b>	
Om telefonen inte fungerar	11
Skötsel och underhåll	11
Teknisk information	11
Miljö och återvinning	11


## **Inledning**

Tack för att Du har valt att köpa en CL100 telefon. Vi hoppas att Du kommer att bli nöjd med produkten.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten.


**Varning!** Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel och är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att telefonen är ställd på den lägsta nivån för respektive användare och att varje användare känner till denna funktion.

## Bildöversikt CL100

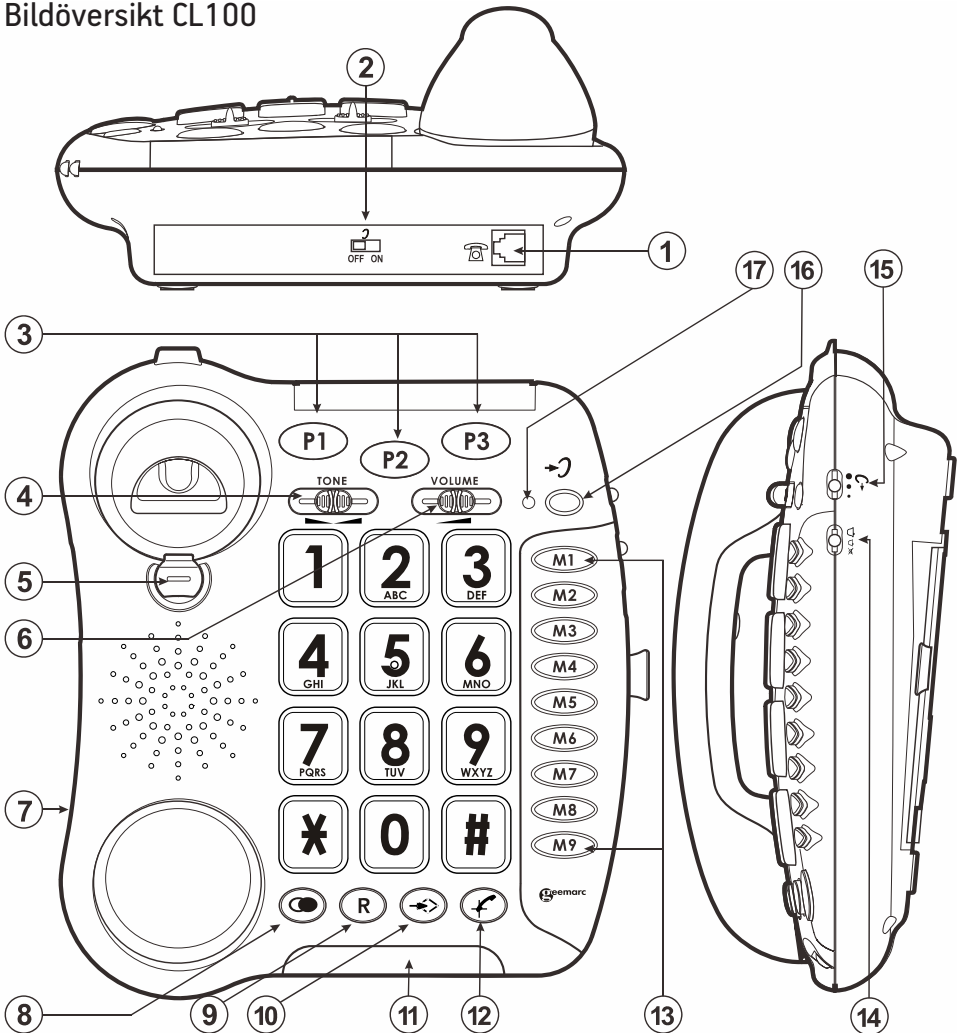


1. Uttag för telefonlinjesladd
2. Ton- och volymkontroll På/Av
3. Snabbnummerknappar 3 st
4. Tonkontroll inkommande ljud
5. Upphängning av telefonlur vid väggmontering (vrid 180 grader, se Väggmontering s. 6)
6. Volymkontroll inkommande ljud
7. Uttag för sladd till telefonlur
8. Återuppringningsknapp senast slagna nummer

9. R-knapp
10. Knapp för lagring av snabb- och kortnummer
11. Röd lampa – Blinkande telefonsignalsindikator
12. Sekretessknapp
13. Kortnummerknappar
14. Inställning av nivå för ringsignalen
15. Inställning av nivå på utgående ljud
16. Knapp för aktivering av inställning av ton- och volymjustering
17. Röd lampa för aktiverad inställning av ton- och volymjustering

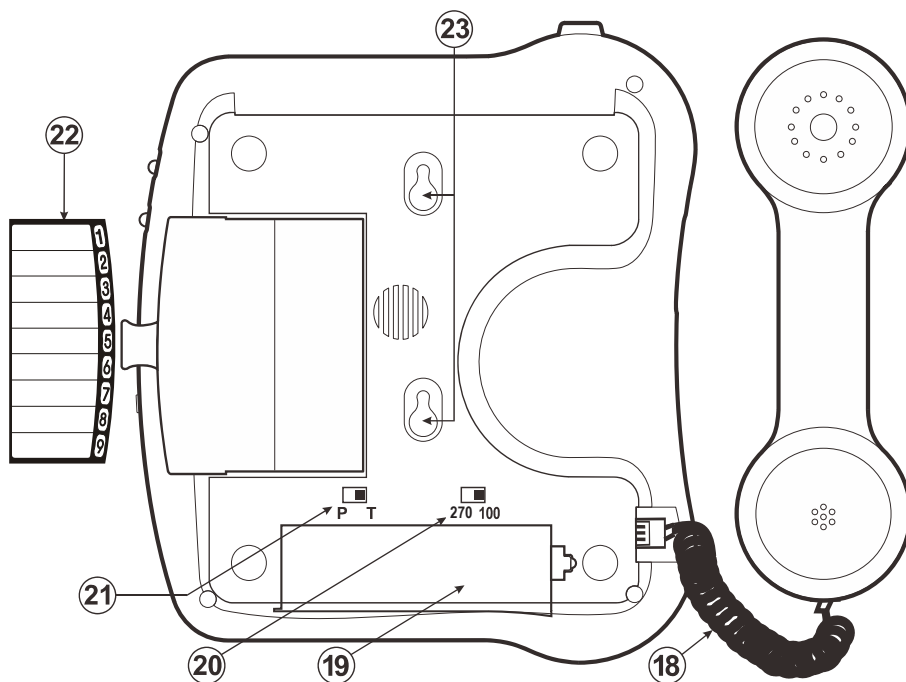

18. Telefonsladd
19. Batterilucka
20. TBR-omkopplare
21. Ton-/pulsval (T/P)
22. Telefonnummerlista
23. Skruvhål för väggmontering

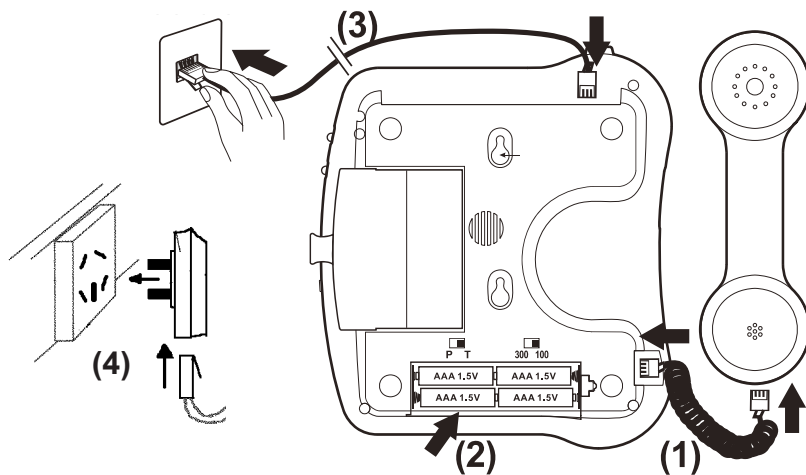

## Installera telefonen

### Ansluta telefonen

1. Anslut telefonluren till telefonen.
2. Öppna batterifacket genom att bända med en liten skruvmejsel eller dyl. Sätt in 4 st AAA 1,5V alkaline-batterier (ingår ej vid telefonköpet) i batterifacket. Batterierna behövs om du vill öka nivån på ringsignalen (ca 10dB). Sätt tillbaka locket till batterifacket.
3. Anslut telefonlinjesladden till telefonen. Anslut andra änden av telefonlinjesladden till telefonjacket.
4. Alternativt, anslut andra änden av telefonlinjesladden till telefonpluggen som ansluts till telefonjacket.

**OBS!** Telefonpluggen skall sitta ytterst, ovanpå ev. annan utrustning såsom modem o.dyl.

## Ställa in ringsignalens volym

Ringsignalen kan ställas i 3 lägen (avstängd - svag - stark) med knapp (14) på höger sida av telefonen:

 : Off,  : Low,  : Hi

OBS! Nivån på ringsignalen ökas med ca 10dB när telefonen förses med batterier (se sid 6, Ansluta telefonen).

## Ton-/pulsval (T/P)

Ton-/pulsval (21) är fabriksinställd på tonval (T). Om Du inte får kopplings-ton när Du försöker ringa ut är telefonen förmodligen ansluten till en gammal telefonväxel. Om detta problem uppstår måste omkopplingsknappen ställas om till pulsval (P).

## TBR-omkopplare

TBR-omkopplaren (20) skall vara inställd på 100 ms (fabriksinställning).

## Väggmontering

Om Du vill hänga telefonen på väggen måste Du justera upphängningen av telefonluren.

Ta tag i den svarta plastbiten som sitter på ovansidan av telefonen under hördelen på telefonluren (5) och vrid den 180 grader. Genom att göra detta försäkrar Du Dig om att luren ej ramlar ned då telefonen sitter på väggen.

Gör två hål i väggen på 80 mm avstånd. Skruva in skruvarna (och ev. plugg).

OBS! Skruva inte ända in, lämna ett avstånd på 6-7 mm från väggen. Häng upp telefonen på skruvhuvudena och dra telefonen nedåt för att säkra upphängningen.

# Använda telefonen



## T-slinga

Om Du använder hörapparat, ställ in hörapparaten på T (teleslinga) för att utnyttja den inbyggda teleslingan.

## Svara på inkommande samtal


När telefonen ringer, lyft på luren och svara på vanligt sätt. Efter avslutat samtal läggs luren åter på plats.

## Volym- och tonkontroll (inkommande ljud)




Du kan öka volymen och justera tonen på det inkommande ljudet efter Dina egna behov. Knappen med symbolen  (16) används för att aktivera/ inaktivera inställningarna under samtalet. När inställningen är aktiverad lyser den röda lampan bredvid knappen med symbolen .

### Justera volym och ton

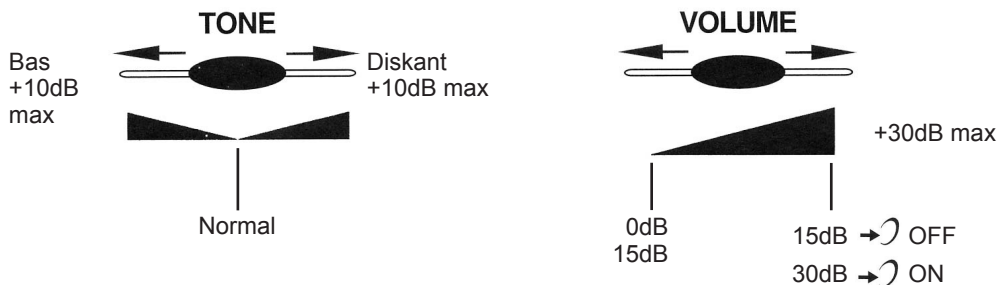
Kontrollera att den röda lampan bredvid knappen med symbolen  lyser. Justera ton och volym med knapparna **TONE** (4) och **VOLUME** (6).



**OBS!** När ton-/volymkontroll och utgående volym är ställda i max-läge kan ett visslande ljud uppstå. Ställ i så fall in utgående volym på min (se ill. sid 9).

När omkopplingsknappen med symbolen  (2) är i läge **ON**, aktiveras den individuella inställningen varje gång någon använder telefonen. När symbolen  (2) är i läge **OFF**, måste förstärkningsinställningen aktiveras genom att trycka på knappen med symbolen  (16) på ovansidan av telefonen.




Ton och volym 15-30dB är endast aktiverad när -knappen på telefonens ovansida är ställd på **ON**. Är den ställd i **OFF** kan endast volymen justeras, 0-15dB.

## Ringa ett samtal


Lyft på luren på vanligt sätt och slå önskat nummer. Efter avslutat samtal läggs luren åter på plats.

## Justera utgående volym

Om Du har en svag röst eller om den Du pratar med har svårt att uppfatta vad Du säger, kan Du öka utgående volym med omkopplingsknappen med nedanstående symbol (15). Vid behov kan den utgående volymen även sänkas.

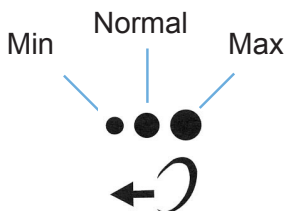


## Återuppringning

Lyft på luren och tryck på knappen med symbolen  (8) så slås det senaste telefonnumret automatiskt (fungerar ej för snabb- och kortnummer).

## Återuppringning med knapparna med symbolerna \* och #

\*och # -serviceknappar är avsedda för nyare, digitala växlar. Vänligen vänd Dig till Din telefonoperatör för ytterligare information.

## Sekretess



Om Du vill säga något till en eller flera personer som befinner sig i samma rum som Du, men inte vill att den Du pratar med i telefonen skall uppfatta vad ni säger, håll nere knappen med symbolen  (12). Du hör vad den Du pratar med i telefonen säger, men denne kan inte höra vad Du säger så länge Du håller knappen nedtryckt. Släpp upp knappen för att återgå till normalt telefonsamtal.

## Ställa in snabb- och kortnummer

Telefonen kan lagra 12 telefonnummer varav 3 snabbnummer (max 21 siffror för varje telefonnummer).

De tre snabbnumren är extra lättåtkomliga genom de tydliga knapparna **P1**, **P2** och **P3** (3) på ovsidan av telefonen. Vi rekommenderar att Du ställer in dessa nummer när Du installerar telefonen. Dessa tre knappar lämpar sig utmärkt för att lägga in telefonnummer till t.ex. hemtjänsten, nödnummer etc.

Gör så här för att lagra snabb- och kortnummer:

1. Lyft på luren.
2. Tryck på knappen med symbolen  (10) och håll nere tills du hör ett pip ljud i luren.
3. Slå det nummer Du vill spara.
4. Tryck på knappen med symbolen  (10) igen.
5. Välj och tryck på någon av knapparna **P1**, **P2**, **P3** (3) eller någon av knapparna **M1**, **M2**, ....., **M9** (13).
6. Numret är nu lagrat på den knapp Du valt. Lägg på luren.

**OBS!** Om Du kopplar ur telefonen försvinner de lagrade numren efter ett par timmar.

Om Du vill ändra ett telefonnummer försvinner det gamla numret automatiskt när Du lägger in ett nytt telefonnummer enligt ovanstående beskrivning.

## Ringa ett snabb- eller kortnummer

Lyft på luren och tryck på någon av snabbknapparna **P1**, **P2**, **P3** (3) eller kortnummerknapparna **M1**, **M2**, ....., **M9** (13). Telefonen slår då det nummer som lagrats på respektive knapp.

Använd telefonregistret som finns under telefonen för att anteckna de lagrade numren.

## Övrigt

### Om telefonen inte fungerar

1. Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt. Extra viktigt är att telefonlurens modularkontakter är ordentligt intryckta, annars finns det risk att den Du talar med inte hör vad Du säger. Testa genom att dra i sladden, den skall ej lossna.
2. Kontrollera omkopplingsknapparna på undersidan av telefonen:
  - TBR-omkopplaren (20) skall vara inställd på 100
  - Ton-/Pulsval (21) skall vara inställd på T (tonval) om telefonen är ansluten till en modern telefonstation.
3. Vänligen kontakta försäljningsstället om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar.

### Skötsel och underhåll

Telefonen kräver normalt sett inget underhåll. Om telefonen skulle bli smutsig, torka då enheten med en fuktig trasa. Använd inga lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.

**OBS!** För att minska risken att telefonen förstörs av blixtnedslag bör telefonen kopplas ur vid kraftiga åskoväder eller installeras med ett överspänningsskydd.

### Teknisk information

För teknisk information och gällande deklarerationer hänvisar vi till originalbruksanvisningen.

För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr och CE-certifikat som kan laddas ner från på [www.edin.se](http://www.edin.se).

### Miljö och återvinning

Släng förbrukade batterier/produkten enligt gällande miljöföreskrifter. Bo EDIN AB är anslutna till FTI (fd REPA) och EI-kretsen. Om Du följer ovanstående önskemål om återvinning medverkar Du till en bättre miljö.



Bo Edin AB  
Besöksadress

Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö  
Förrådsvägen 2B, 181 41 Lidingö

Tel: 08 7671818  
Fax: 08 7671820

Email: [info@edin.se](mailto:info@edin.se)  
Webb: [www.edin.se](http://www.edin.se)